

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 (35794000)

ジーシーワクサーデュオ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 電気的定格

電源電圧：AC100V 50/60Hz

電源入力：15VA

電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器

3. 原理

ハンドピースの先端に設置したチップに熱を供給して、ワックスアップ、ろう堤作製、人工歯配列などに使用する装置である。

【使用目的又は効果】

ワックスパターンを彫刻するために、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先でワックスを軟化させるために加熱する。

【使用方法等】

1. 設置方法

本装置は精密機器のため、平らで安定したところに設置し、自動練和器などの振動をとまなう機器のそばには設置しないこと。

2. 使用方法

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

- 1) コードハンガーを組み立て、ハンドピースコードをコードハンガー先端部のリングに通す。
- 2) コードハンガーを両面テープで机や壁に取り付け、ハンドピースコードを本体正面のハンドピースコードソケットに接続する。
- 3) チップ受けをテーパーがある側を上にして、スタンドのホルダー部に奥まで挿入する。
- 4) 作業に応じたチップをハンドピースに取り付け、メインスイッチをONにする。
- 5) ボリュームで温度を設定する。
但し、本体右側に接続しているハンドピースのみ、クイックボタンを押している間、フルパワー（ボリューム10と同等）で昇温することができる。
- 6) 作業終了後、メインスイッチをOFFにする。

3. 使用環境

本装置は周囲温度が10～40℃の環境下で使用すること。

【使用上の注意】

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

1. 歯科医療有資格者以外は本装置を使用しないこと。
2. 使用後は、必ず電源プラグを抜くこと。
3. 幼児や子供の手の届く場所には設置、保管をしないこと。
4. コードハンガー先端部が目にあたらないように注意すること。
5. 使用中及び使用直後はチップとハンドピース先端が熱くなっているため、手を触れないように注意すること。
6. チップの収納部分にハンドピースを立てて放置しないこと。チップがスタンドの金属部に長時間接触しているとスタンドが熱くなります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 周囲の温度が-10℃～50℃であること。
- 2) 周囲の湿度が30%～75%であること。
- 3) 周囲の気圧が700hPa～1060hPaであること。
- 4) 水のかからない場所に保管すること。
- 5) 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 6) 風通しの良い場所に保管すること。
- 7) 傾斜のない、また振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- 8) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 耐用期間

- 1) 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後10年とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
詳細については付属の使用説明書に従い行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号

：（お客様窓口）0120-416480