


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置（35761000）
ジーシー ステップライト S L - I

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

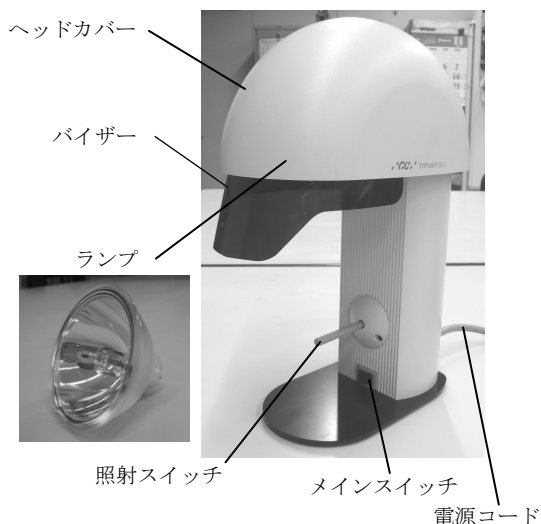

2. 電気的定格

電源：AC100V 50/60Hz
電源入力：170VA
電撃に対する保護の形式：クラス I 機器

3. 原理

ハロゲンランプ（ランプ）により光を照射し、高分子材料を予備重合する装置である。

【使用目的又は効果】

高分子材料を予備重合するために用いる。

【使用方法等】

1. 設置方法

本装置は精密機器のため、平らで安定したところに設置し、自動練和器などの振動をともしない機器のそばには設置しないこと。

2. 使用方法

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

- 1) メインスイッチを ON にすると、パイロットランプが点灯する。
- 2) 重合物を照射範囲に導入しながら、照射スイッチを軽く倒しランプを点灯させる。
照射スイッチより手を離してから約 10 秒後に自動的に消灯する。点灯中はランプ冷却用のファンが回転する。
- 3) 重合物を重合スポットに合わせる。
前後・左右方向には照射スイッチのレバー先端部を、高さはパイザーの側面切りかき部の範囲を目安にすること。光が強く当たる部分が重合スポットである。
- 4) メインスイッチを OFF にする。

3. 使用環境

本装置は周囲温度が 10～40℃の環境下で使用する。

【使用上の注意】

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

1. 歯科医療有資格者以外は本装置を使用しないこと。
2. 人体に影響のある紫外領域の光線は照射していないが、直視は避けること。

3. ランプ点灯中及び消灯後しばらくの間は、ランプ、熱吸収フィルターが熱くなっているので触れないこと。
4. 交換ランプはステップライト S L - I 専用のランプを使用すること。
5. 電源プラグを接続する際は、必ずアースを接続すること。
6. 長時間連続して使用すると、温度上昇によるランプ切れを防ぐため、点灯しない又は自動的に消灯する場合がある。この場合は、しばらく冷却してから使用すること。
7. ランプ装着時、ランプホルダーとランプの間に指を挟まないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 周囲の温度が -10℃～50℃であること。
- 2) 周囲の湿度が 30%～75%であること。
- 3) 周囲の気圧が 700hPa～1060hPa であること。
- 4) 水のかからない場所に保管すること。
- 5) 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 6) 風通しの良い場所に保管すること。
- 7) 傾斜のない、また振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- 8) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 耐用期間

- 1) 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後 10 年とする。〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
詳細については付属の使用説明書に従い行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480