
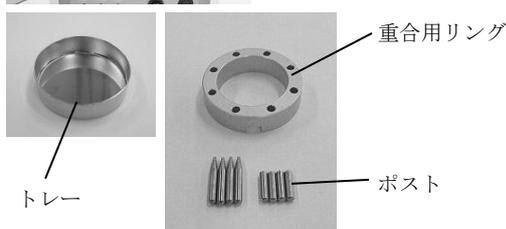
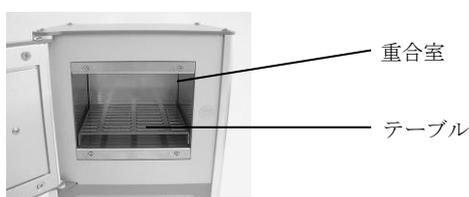


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 (35761000)
ジーシー プチオープン PO-I

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

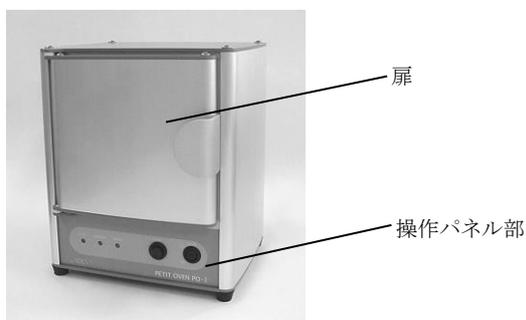

2. 電気的定格

電源電圧：AC100V 50/60Hz
電源入力：250VA
電撃に対する保護の形式：クラス I 機器

3. 原理

ファンにより、ヒーターの熱をチャンバー内に送り込み、高分子材料を重合する装置である。

【使用目的又は効果】

* 高分子材料を重合するために用いる

【使用方法等】

1. 設置方法

本装置は精密機器のため、平らで安定したところに設置し、自動練和器などの振動をとまなう機器のそばには設置しないこと。

2. 使用方法

- 1) MAINスイッチをONにすると、MAINインジケータが点灯し、重合室内が重合可能温度まで加熱される。
- 2) 重合可能温度に到達するとSTANDBYインジケータが点灯し、ブザーが鳴り、重合開始準備状態となる。
- 3) 扉を開け、重合物をトレー又は重合リングにセットし、重合室のテーブルの上に載せ、扉を閉める。
- 4) STARTスイッチを押すと重合が開始され、STANDBYインジケータが消灯し、CUREインジケータが点灯する。
- 5) 重合が終了すると、MAINインジケータが点滅、同時にCUREインジケータが消灯し、ブザーが鳴るので重合室から重合物を取り出す。

6) MAINスイッチをOFFにする。

3. 使用環境

本装置は周囲温度が10～40℃の環境下で使用すること。

【使用上の注意】

詳細については付属の使用説明書を使用前に必ず読むこと。

1. 歯科医療有資格者以外は本装置を使用しないこと。
2. 電源プラグをAC100Vのコンセントに接続する際は、必ず3Pのコンセントに接続すること。
3. 使用後は、必ず電源プラグを抜くこと。
4. 幼児や子供の手の届く場所には設置、保管をしないこと。
5. はじめて使う場合、内部から多少の「におい」がする可能性があるが、故障ではありません(内部ヒーター組立時のオイルが燃焼しています)。
6. 重合中は扉を開けないこと。重合物の未重合などの恐れがあります。
7. 重合物は必ずトレーもしくは重合リングを使用し、テーブルの上に載せて重合すること。また、テーブルの上下の向きを逆にセットしたり、トレーを直接重合室下部のスリット部の上に直接置いたりして、重合室下部のスリット部を塞がないこと。故障の原因となります。
8. 重合物を重合室下部のスリットに落とさないよう注意すること。故障をまねく恐れがあります。
9. 歯科材料が本体外装等に微量であっても繰り返し接触する場合は、アルコール等で表面を清掃すること。
10. 濡れた手(グローブ)での作業は避けること。故障をまねく恐れがあります。
11. 本製品は、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所やヒーターなどの近くには設置しないこと。故障をまねく恐れがあります。
12. 扉を強く閉めるなど、強い衝撃を与えないこと。故障をまねく恐れがあります。
13. 硬質レジン(当社製品)を使用すること。他社製品の硬質レジンのご利用に伴う事故・破損に関しては、補償の対象外となります。
14. 硬質レジン(当社製品)の使用期限が過ぎていたり、保管方法が適切でなかったりする場合、重合状態に影響を与えるため、硬質レジン(当社製品)の説明書に従って、使用期限や保管方法には充分注意すること。
15. 本使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 周囲の温度が-10℃～50℃であること。
- 2) 周囲の湿度が30%～75%であること。
- 3) 周囲の気圧が700hPa～1060hPaであること。
- 4) 水のかからない場所に保管すること。
- 5) 温度、湿度、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 6) 風通しの良い場所に保管すること。
- 7) 傾斜のない、また振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- 8) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 耐用期間

- 1) 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後10年とする。[自己認証(当社データ)による]

使用説明書を必ずご参照ください。

P0969(3)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
詳細については付属の使用説明書に従い行うこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480