

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ (35768000)

ジーシー PTC ブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

【形状・構造及び原理等】

形 状 : 歯面清掃用ブラシ

構 造 : ナイロン（ブラシ部）
真鍮（ニッケルメッキ）（ホルダー部、スクリュー部）

原 理 : 本品は、ブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯面の清掃・研磨を行うことができる。

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具をいう。

【使用方法等】

- 1) PTC コーンをスクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースに取り付けます。
スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースがない場合は、別売の PTC マンドレルを PTC ブラシのネジ部分にはめ込み、通常のラッチコントラハンドピースに装着して使用します。
- 2) PTC ブラシに PTC ペースト(歯面研磨用ペースト)を適量塗布し、5000 回転数/分 以下の回転数で歯面研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品はハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実にねじ込み、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 2) 本品を PTC マンドレルに装着して使用する場合は、本品をマンドレルに最後まで確実にねじ込んだ後、ハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実に挿入し、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 3) 使用前に口腔外で予備回転を行ない、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本材（本品）及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 破損や口腔内を傷つける原因になるので、使用回転数を越えた回転数、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
 - ② 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、術者及び患者は保護眼鏡などを使用すること。
 - ③ モーターを逆回転（左回転）させるとハンドピースから外れる恐れがあるため、必ず正回転（右回転）で使用する。
 - ④ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光を避け、室温にて保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。