


プロフォーム

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

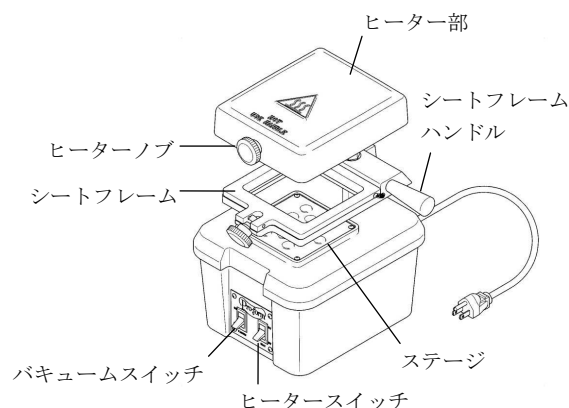

2. 寸法及び重量

- 1) 寸法 幅:275mm×奥行き:240mm×高さ:340mm
(シートフレームハンドル装着時)
- 2) 重量:6.8kg

** 3. 電氣的定格及び分類

- 1) 電源 : AC100V 50/60Hz
- 2) 電源入力: 950VA
- 3) 電撃に対する保護の形式: クラス I 機器

4. 原理

本製品は、角材シート材を加熱させ圧接することにより、マウスピースの成形を行う装置である。

【使用目的又は効果】

熱可塑性材料を射出・加圧等で成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置をいう。

【使用方法等】

1. 設置方法

- 1) 本製品の詳細な設置方法は、使用説明書の「使用方法」を必ず読むこと。

2. 使用方法

- 1) 本製品の詳細な使用法は、使用説明書の「使用方法」を必ず読むこと。

*[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 加熱中及び加熱後15分間は、やけどをする可能性があるため、ヒーターノブ以外は触れないこと。
- 2) シートフレームを下げる際、指などを挟まないように注意すること。
- 3) 濡れた手(グローブ含む)での作業は、故障の原因となるため避けること。
- 4) 本製品のヒーター部は高温になるため、可燃物を本体付近に置かないこと。
- 5) 異物混入を避けるため、ステージは常に清潔に保つこと。
- 6) シート材によっては加熱・吸引時間等異なる場合があるため、材料の取扱説明書に従うこと。

【使用上の注意】

・詳細については使用説明書を必ず読むこと。

* 1. 重要な基本的注意

- 1) 分解、改造は絶対にしないこと。
- 2) 使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- 3) メインスイッチがONの状態では焼成チャンバ内のヒーター線に触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

保管場所については次の事項に注意すること。

- 1) 水のかからない場所に保管すること。
- 2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 3) 風通しの良い場所に保管すること。
- 4) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
- 5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

* 2. 耐用期間

- 1) 10年間 [自己認証(当社データ)による]
※正規の使用法、保守点検、消耗品等の交換を行った場合に限る。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 本製品及び部品は必ず定期点検を行うこと。
 - 2) しばらく使用しなかった装置を再使用する場合には、使用前に必ず装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。
- ・詳細については付属の使用説明書に従うこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480