

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス（70893000）

ジーシー パラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】

形状 : 板状
500g／1 函
1 kg／1 函
1 kg／1 函×10 函（10kg）

主成分 : パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、ダンマー

原理 : 加熱することにより可塑性が大きくなり、軟化、溶融することができ、冷却後は、加熱前の可塑性に戻る。

特性

項目	規格	参考値
フロー	23℃	1.0%以下
	37℃	5.0～90.0%

（試験方法；JIS T 6502）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー
発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号 : （お客様窓口）0120-416480

【使用目的又は効果】

主として、義歯床仮床、人工歯の排列等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 板状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところでロール状に巻いた棒状にします。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形にして、基礎床に圧接していきます。
- 3) 過不足部分は盛り足したり、削ったりして咬合床を完成します。
- 4) 咬合床の調整、人工歯の排列、蠟義歯の作製は通法に従い作業します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 咬合採得時、過熱による火傷に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①採得した咬合床は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。〔感染症を引き起こす可能性がある〕
 - ②本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
 - ③他の製品と混用しないこと。
 - ④使用場所には消火器を備えること。
 - ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、室温で保管する。
- ・本品を、高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所など）に放置しない。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。