



A a d v a スキャニングジグ

【形状・構造及び原理等】


製品形状


形状が同一のものは、側面の印字で型式をご確認ください。

1) FDアパットメント専用ジグ *

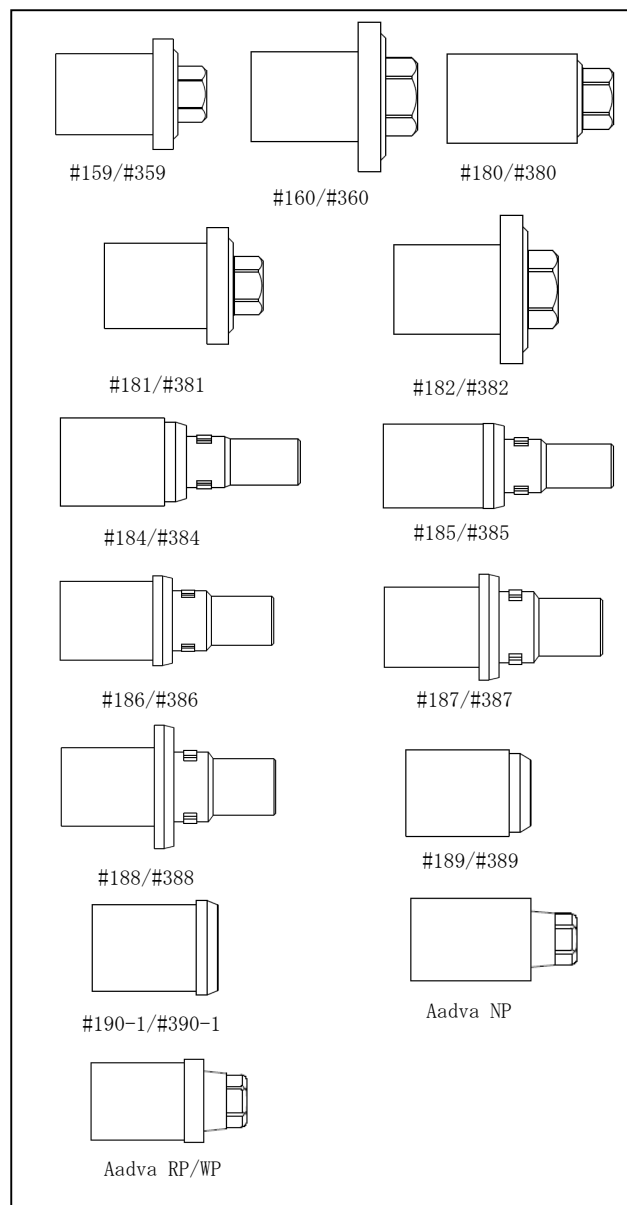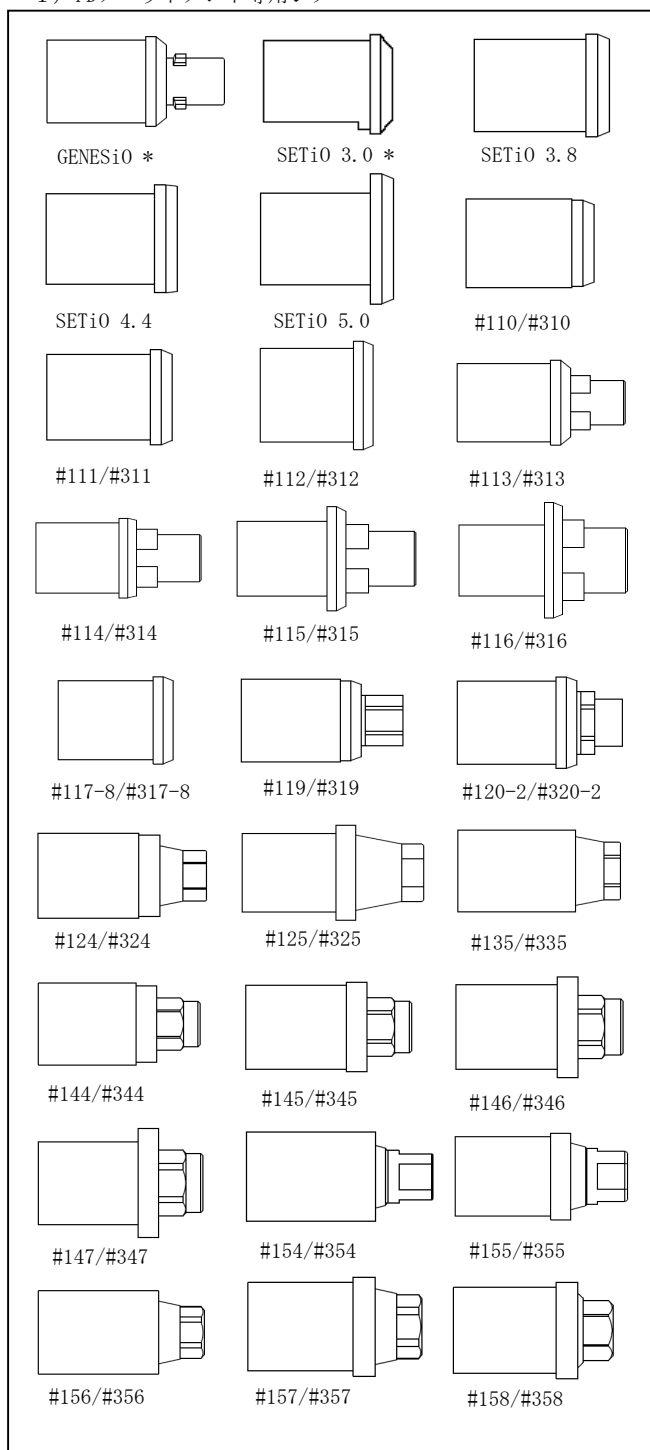

2) Aadvia DIF専用ジグ *

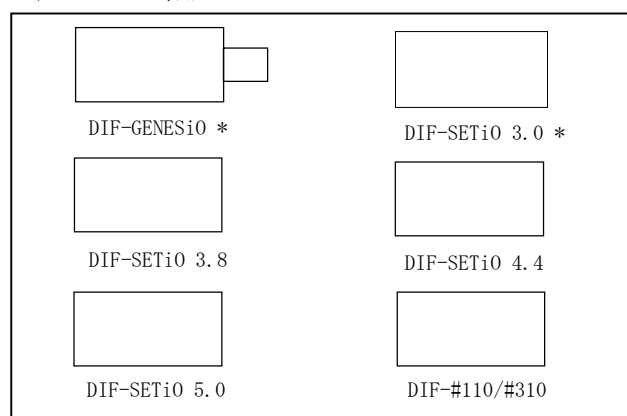

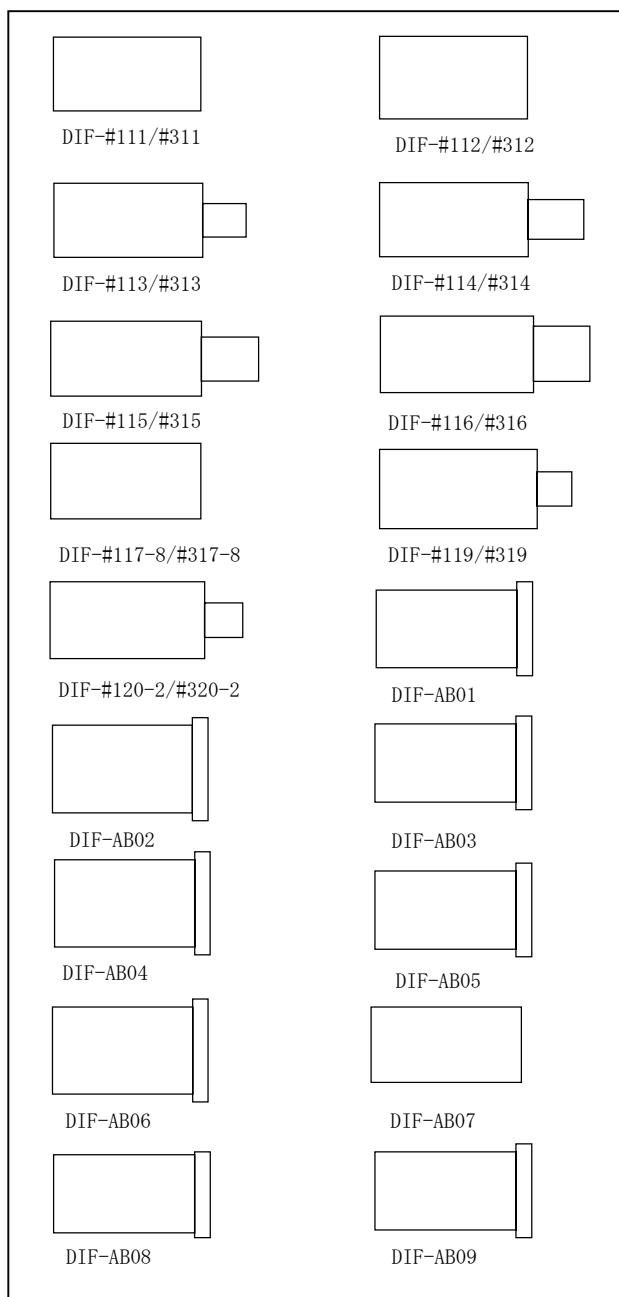

原理

本品は、作業用模型に埋入したアナログに固定して歯科用CAD/CAMシステムの計測機を用いて計測することにより、コンピュータ画面上での歯科用インプラントの上部構造の設計を可能にした計測用ジグであり、設計データをもとに加工した上部構造（既製の歯科用インプラントアバットメントの嵌合部含む）を提供するものである。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を、歯科用CAD/CAMシステムを用いて作製するために使用する技工用の計測用ジグである。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 作業用模型に埋入されているアナログから、歯肉再現構造を取り外します。
 - 2) 作業用模型に埋入されているアナログに、本品を適切な位置に合わせて装着し、対応する各種純正品のスクリューで固定します。（締結トルク：1～3N・cm）
 - 3) 本品を固定した作業用模型を、ジーシーが提供する歯科用CAD/CAMシステムの計測機で計測します。

- 4) 作業用模型から本品を取り外し、1) で取り外した歯肉再現構造を模型に装着して、ジーシーが提供する歯科用CAD/CAMシステムの計測機で計測します。
- 5) ジーシーが提供するCADソフト画面に、計測したデータが自動的にグラフィック表示されます。
- 6) 計測データをもとにジーシーが提供するCADソフトを使用して、臨床的・技術的要求に応じた歯科用インプラントの上部構造を設計します。

2. 使用環境

本品は、周囲温度が15～35℃の環境下で使用します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 幼児や子供の手の届く場所には設置、保管しないこと。
- 3) 本品の形状変更、改造は絶対しないこと。
- 4) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 5) 本品は、模型上でのみ使用すること。口腔内では使用しないこと。
- 6) 本品の使用中に、術者の手指などを傷つけないように取り扱いには十分に注意すること。
- 7) 金属製のピンセット等で把持した場合、表面を傷つけないこと。
- 8) 本品を使用中にガタつきが著しく大きい場合、破損または汚れが著しい場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- 9) 本品をスチーマー洗浄しないこと。
- 10) 歯科用インプラントの上部構造の設計は、専用のアプリケーションソフトウェア（ジーシーが提供する付属のCADソフト）を使用すること。
- 11) 本品を使用する場合は、対応した各種純正品のスクリューを使用すること。
- 12) 本品をアナログに固定する際、手締めにより固定し、3N・cm以上の締付トルクを加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本品は、常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管する。
- 2) 本品は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

- 1) 目視で確認できる変形、傷があるものは使用しない。
- 2) 表面に汚れが付着した場合は、水でぬらした柔らかい布でやさしく拭く。
- 3) しばらく使用しなかった本品を再使用する際には、使用前に必ず本品が正常かつ安全に機能することを確認する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480