

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)


ジーシー インプラント R e ・ 技工用コンポーネント
(フィクスチャーアナログ、ブリッジ用アバットメントアナログ、ボールアバットメントアナログ)

【形状・構造及び原理等】


〈フィクスチャーアナログ〉

本品は、補綴物を作製するための技工用器具であり、模型上でフィクスチャーの位置及び形状を再現するためのフィクスチャー代替品である。本品は、フィクスチャーの嵌合装置の形態に対応してセテリオ用とジェネシオ用の2種類がある。これらは患者の口腔内の状況に対応できるよう寸法等が異なる。

フィクスチャーアナログ セテリオ用

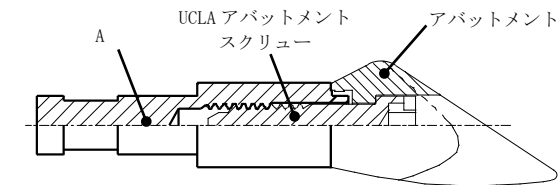


フィクスチャーアナログ ジェネシオ用

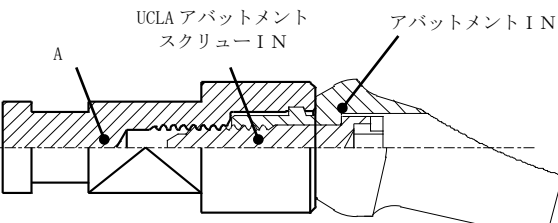

〈アバットメントアナログ/ブリッジ用アバットメントアナログ〉


本品は、補綴物を作製するための技工用器具であり、模型上でコンカルアバットメントの位置及び形状を再現するためのコンカルアバットメント代替品である。本品は、コンカルアバットメントの形態に対応して単独歯症例用と複数歯連結症例用の2種類がある。これらは患者の口腔内の状況に対応できるよう寸法等が異なる。

アバットメントアナログ/ブリッジ用アバットメントアナログ

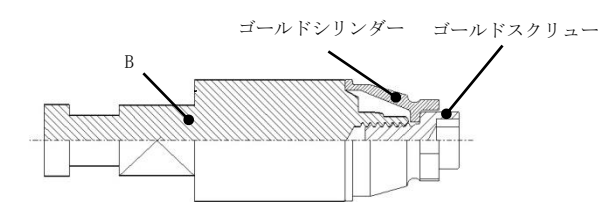

〈ボールアバットメントアナログ〉

本品は、補綴物を作製するための技工用器具であり、模型上でボールアバットメントの位置及び形状を再現するためのボールアバットメント代替品である。

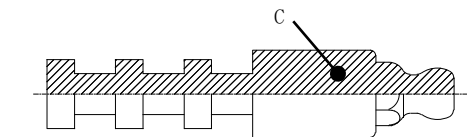

【材質】

部位	名称	原材料と金属成分
(A)	φ3 フィクスチャーアナログ	チタン合金： チタン、アルミ ニウム、バナジ ウム、鉄
	φ3.4、φ3.8*、φ4.4*、φ5* フィクスチャーアナログ IN Plus	
	φ3.8、φ4.4、φ5 フィクスチャーアナログ IN	
(B)	φ3/3.4 ブリッジ用アバットメントアナログ	ステンレス鋼
(A)	φ3.8、φ4.4、φ5 フィクスチャーアナログ	
	φ3.8、φ5 アバットメントアナログ	
(B)	φ3.8、φ5 ブリッジ用アバットメントアナログ	
(C)	ボールアバットメントアナログ	

【部品名】

φ3 フィクスチャーアナログ
φ3.8 フィクスチャーアナログ
φ4.4 フィクスチャーアナログ
φ5 フィクスチャーアナログ
φ3.4 フィクスチャーアナログ IN Plus
φ3.8 フィクスチャーアナログ IN Plus *
φ4.4 フィクスチャーアナログ IN Plus *
φ5 フィクスチャーアナログ IN Plus *
φ3.8 フィクスチャーアナログ IN
φ4.4 フィクスチャーアナログ IN
φ5 フィクスチャーアナログ IN
φ3.8 アバットメントアナログ
φ5 アバットメントアナログ
φ3/3.4 ブリッジ用アバットメントアナログ
φ3.8 ブリッジ用アバットメントアナログ
φ5 ブリッジ用アバットメントアナログ
ボールアバットメントアナログ

【原理】

〈フィクスチャーアナログ〉

フィクスチャーのアバットメント嵌合部と同じ形状を有し、石こう中での回転及び移動を防止する形態を付与することにより、技工作業時にフィクスチャーの代替とする。

〈アバットメントアナログ/ブリッジ用アバットメントアナログ〉

コンカルアバットメントのゴールドシリンダー嵌合部と同等の形状を有し、石こう中での回転及び移動を防止する形態を付与することにより、技工作業時にコンカルアバットメントの代替とする。

〈ボールアバットメントアナログ〉

ボールアバットメントのメタルハウジング嵌合部と同等の形状を有し、石こう中での回転及び移動を防止する形態を付与することにより、技工作業時にボールアバットメントの代替とする。

【使用目的又は効果】

本品は、顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。

【使用方法等】

〈フィクスチャーアナログ〉

- 1) 印象採得：
フィクスチャーにフィクスチャーインプレッションコーピングを締結して、印象を採得します。
- 2) 石こうの注入：
本品をフィクスチャーインプレッションコーピングに締結した後、印象に石こうを注入して石こうの硬化を待ちます。
- 3) 作業模型の完成：
石こう硬化後、印象を撤去して作業模型が完成します。
- 4) 補綴物の作製：
フィクスチャーガイドピンなどを用いて、作業模型上の本品にアバットメント又はUCL Aプロビジョナルコーピングを締結し、技工作業を行います。

〈アバットメントアナログ/ブリッジ用アバットメントアナログ〉

- 1) 印象採得：
コンカルアバットメントにインプレッションコーピングを締結して、印象を採得します。
- 2) 石こうの注入：
本品をインプレッションコーピングに締結した後、印象に石こうを注入して石こうの硬化を待ちます。
- 3) 作業模型の完成：
石こう硬化後、印象を撤去して作業模型が完成します。
- 4) 補綴物の作製：
ガイドピンなどを用いて、作業模型上の本品にゴールドシリンドラー又はプロビジョナルコーピングを締結し、技工作業を行います。

〈ボールアバットメントアナログ〉

- 1) 印象採得：
口腔内にボールアバットメントを装着し、印象を採得します。
- 2) 石こうの注入：
採得した印象のボール部に本品を所定の位置まで挿入した後、印象に石こうを注入して石こうの硬化を待ちます。
- 3) 作業模型の完成：
石こう硬化後、印象を撤去して作業模型が完成します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、下記製品専用の技工コンポーネントとして使用すること。
〈フィクスチャーアナログ〉
 - ・セティオフィクスチャー
 - ・セティオテーパーフィクスチャー
 - ・セティオ Plus ストレート
 - ・セティオ Plus テーパー〈フィクスチャーアナログ IN〉*
 - ・ジェネシオフィクスチャー
 - ・ジェネシオテーパーフィクスチャー〈フィクスチャーアナログ IN Plus〉*
 - ・ジェネシオ Plus ストレート
 - ・ジェネシオ Plus テーパー〈アバットメントアナログ〉
 - ・コンカルアバットメント
 - ・コンカルアバットメント IN〈ブリッジ用アバットメントアナログ〉
 - ・コンカルアバットメント (六角なし)
 - ・コンカルアバットメント IN (キーなし)
 - ・アングルコンカルアバットメント
 - ・アングルコンカルアバットメント IN〈ボールアバットメントアナログ〉
 - ・ボールアバットメント
 - ・ボールアバットメント IN
- 2) 本品をインプレッションコーピング、アバットメント、ゴールドシリンドラー等と装着する際には、本品との間に付着物等がなく、完全に適合していることを確認した上で行うこと。
- 3) 本品を取り扱う際には、他のコンポーネントとの接触面などに傷を付けないよう注意すること。
- 4) 本品をろう着時の固定用に使用した場合には、表面に酸化物が蓄積するため、印象時のアナログとして使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ② 本品の使用に際しては、使用前にジーシーインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシーインプラントシステムマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
- ③ 開封後の本品に、損傷がないことを確認してから使用すること。損傷などが認められた場合には、使用を中止すること。
- ④ 本品を再使用する際に損傷などが認められた場合には、廃棄し、新しい製品を使用すること。
- ⑤ 本品は、専用のコンポーネントに対して使用すること。
- ⑥ 本品の形態変更、改造などをしないこと。
- ⑦ 本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントシステムマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本品は、高温・多湿・直射日光を避けて保管する。〔汚染及び錆を防ぐため〕
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い、正しく使用する。**
洗浄剤は下記のものをお薦めします。
 - ・防錆効果のある洗浄剤、酵素系洗浄剤（ジーシー ハイジーンウォッシュなど）
- 2) 本品は、洗浄を行った後には、錆、変色の発生を防止するため、直ちに水気を拭き取り保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480