


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

ジーシー インプラント R e ・ 技工用コンポーネント (ポリッシングキャップ)


【形状・構造及び原理等】

本品は、補綴物を研磨する際にアバットメント又は UCLA プロビジオナルコーピングのフィクスチャーとの接触面、及びゴールドシリンダー又はプロビジオナルコーピングのアバットメントとの接触面を保護するための技工用器具である。フィクスチャーの嵌合装置の形態に対応してセテリオ用とジェネシオ用の 2 種類、及びコニカルアバットメントに類似の構造を有する 1 種類がある。これらは各径のコンポーネントに対応できるよう寸法等が異なる。


UCLA ポリッシングキャップ セテリオ用

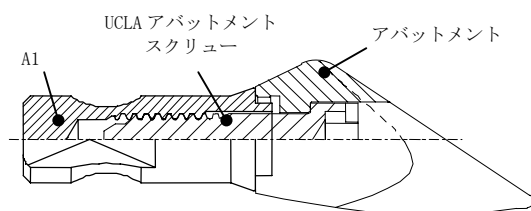

UCLA ポリッシングキャップ ジェネシオ用

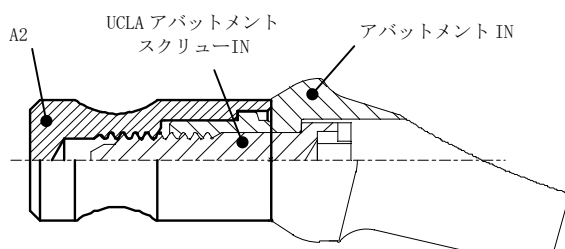

コニカルポリッシングキャップ

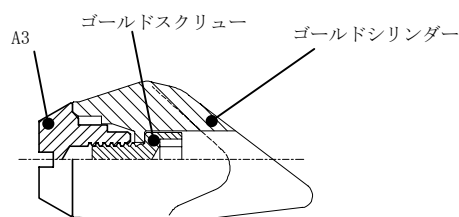

【材質】

部位	名称	原材料と金属材料
A1	UCLA ポリッシングキャップ	ステンレス鋼
A2	UCLA ポリッシングキャップ IN	
A3	コニカルポリッシングキャップ	

【部品名】

- φ3 UCLA ポリッシングキャップ
- φ3.8 UCLA ポリッシングキャップ
- φ4.4 UCLA ポリッシングキャップ
- φ5 UCLA ポリッシングキャップ

- φ3.8 UCLA ポリッシングキャップ IN
- φ4.4 UCLA ポリッシングキャップ IN
- φ5 UCLA ポリッシングキャップ IN
- φ3/3.4 コニカルポリッシングキャップ
- φ3.8 コニカルポリッシングキャップ
- φ5 コニカルポリッシングキャップ

【原理】

フィクスチャーのアバットメント嵌合部と同じ形状を有し、耐摩耗性を有する材料で作製することにより、アバットメントと一体となった補綴物を研磨する際に、アバットメント等のフィクスチャーとの接触面を保護する。

またコニカルアバットメントのゴールドシリンダー嵌合部と同等の形状を有し、耐摩耗性を有する材料で作製することにより、ゴールドシリンダーと一体となった補綴物を研磨する際に、ゴールドシリンダーのコニカルアバットメントとの接触面を保護する。

【使用目的又は効果】

本品は、顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

【使用方法等】

〈UCLA ポリッシングキャップ〉

フィクスチャーガイドピンなどを用いて、本品に補綴物を構成するアバットメント又は UCLA プロビジオナルコーピングを締結して、補綴物の研磨を行います。

〈コニカルポリッシングキャップ〉

ガイドピンなどを用いて、本品に補綴物を構成するゴールドシリンダー又はプロビジオナルコーピングを締結して、補綴物の研磨を行います。
除去の際は、底部の溝をドライバーに嵌合させて固定し、ガイドピンなどを緩めます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) UCLA ポリッシングキャップをアバットメント又は UCLA プロビジオナルコーピングと装着する際には、本品とアバットメント又は UCLA プロビジオナルコーピングとの間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で行うこと。
- 2) コニカルポリッシングキャップをゴールドシリンダー又はプロビジオナルコーピングと装着する際には、本品とゴールドシリンダー又はプロビジオナルコーピングとの間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で行うこと。
- 3) 本品を取り扱う際には、他のコンポーネントとの接触面などに傷を付けないよう注意すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起したときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ②本品の使用に際しては、使用前にジーシーインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシーインプラントシステムマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。

- ③開封後の本品に、損傷などがないことを確認してから使用すること。損傷などが認められた場合には、使用を中止すること。
- ④本品を再使用する際に損傷などが認められた場合には、廃棄し、新しい製品を使用すること。
- ⑤本品は専用のコンポーネントに対して使用すること。
- ⑥本品の形態変更、改造などをしないこと。
- ⑦本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントシステムマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 本品は、高温・多湿・直射日光を避けて保管する。〔汚染及び錆を防ぐため〕
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 消毒剤及び洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い、正しく使用する。
消毒剤は下記のものをお薦めします。
 - ・グルタラル製剤（ハイドリッド[®]20w/v%液など）、グルコン酸クロルヘキシジン（5%ヒピテン[®]液など）、防錆効果のある四級アンモニウム塩系消毒剤（塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなど）下記の消毒剤は、錆・変色の影響が高いので使用できません。
 - ・過酢酸製剤（アセサイド MA 6%消毒液など）、塩素系消毒剤（次亜塩素系ナトリウムなど）、過酸化物質系消毒剤（オキシドール、強酸性水など）、防錆効果のない四級アンモニウム塩系消毒剤（塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなど）、防錆効果のない両性界面活性剤系消毒液洗浄剤は下記のものをお薦めします。
 - ・防錆効果のある洗浄剤、酵素系洗浄剤（ハイジーンウォッシュなど）
- 2) 本品は、洗浄を行った後には、錆の発生を防止するため、直ちに水気を拭き取り保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480