


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

ジーシー インプラント Re・技工用コンポーネント (ろう着用スクリュー)

【形状・構造及び原理等】

本品は、補綴物のろう着時に、フレームワーク中のゴールドシリンダーを、埋没材中のアナログに締結するためのスクリュー (A) である。

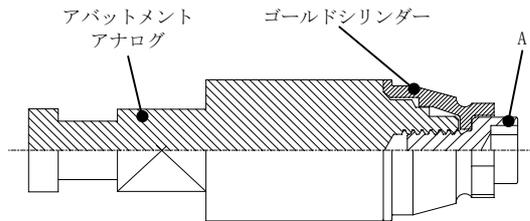

材質

部位	名称	原材料と金属成分
A	ろう着用スクリュー	ステンレス鋼

部品名

ろう着用スクリュー

原理

アバットメントアナログとのネジ嵌合部及びゴールドシリンダーとの嵌合部を併せ持ち、自身に付与されたネジによりこれらのコンポーネントを締結する。

【使用目的又は効果】

本品は、顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

【使用方法等】

仮固定されたフレームワーク中にあるゴールドシリンダーに、本品を用いてアバットメントアナログを締結し、ろう着用埋没材で固定し、通法に従ってろう着します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を締結する際には、ゴールドシリンダーとアバットメントアナログとの間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で締結すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用に際しては、使用前にジーシーインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシーインプラントシステムマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
 - ②開封後の本品に、損傷がないことを確認してから使用すること。損傷などが認められた場合には、使用を中止すること。
 - ③本品の締結には、専用のドライバーを使用すること。
 - ④本品を補綴物の最終締結に使用しないこと。
 - ⑤本品を再使用する際に損傷などが認められた場合には、廃棄して新しい製品を使用すること。
 - ⑥本品は、専用のコンポーネントに対して使用すること。
 - ⑦本品の形態変更、改造などをしないこと。
 - ⑧本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントシステムマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温・多湿・直射日光を避けて保管する。〔汚染及び錆を防ぐため〕
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品は、洗浄を行った後は、錆の発生を防止するため、直ちに水気を拭き取り保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：(お客様窓口) 0120-416480

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。

137327
040361AH