


機械器具 5 8 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

ジーシー インプラント A a d v a 技工用器材

(SRプラスチックシリンダー)

【形状・構造及び原理等】

本品は、補綴物を作製するための技工用器材であり、SRアバットメントに締結する補綴物を鋳造によって作製するためのコンポーネントである。

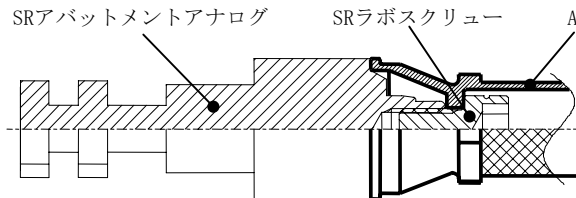

【材質】

部位	名称	原材料と金属材料
A	SRプラスチックシリンダー	PMMA

【部品名】

SRプラスチックシリンダー φ3.8
SRプラスチックシリンダー φ4.8
SRプラスチックシリンダー φ6.0

【原理】

SRアバットメントとの嵌合部及びアクセスホールをもち、ワックス焼却時に焼却されることにより、SRアバットメントに締結する補綴物を作製する。

【使用目的又は効果】

本品は、顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

【使用方法等】

SRアバットメントアナログに本品を嵌合し、スリーブ部を適当な長さで切断します。この上から通法通り補綴物のワックスアップを行います。作製したワックスパターンを埋没し、通法によって焼却します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品とSRアバットメントとの間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起したときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ②本品の使用に際しては、使用前にジーシーインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシーインプラントAadvaマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
 - ③開封後の本品に、損傷がないことを確認してから使用すること。損傷などが認められた場合には、使用を中止すること。
 - ④本品は、専用のコンポーネントに対して使用すること。
 - ⑤本品の形態変更、改造などをしないこと。

- ⑥本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントAadvaマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温、多湿、直射日光を避けて保管する。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。