


ジーシー インプラント A a d v a 技工用器材

(ポリッシングキャップ)


【形状・構造及び原理等】

本品は、補綴物を研磨する際にアバットメントのインプラントとの接触面、及びゴールドシリンダーのSRアバットメントとの接触面を保護するための技工用器具である。

ポリッシングキャップ

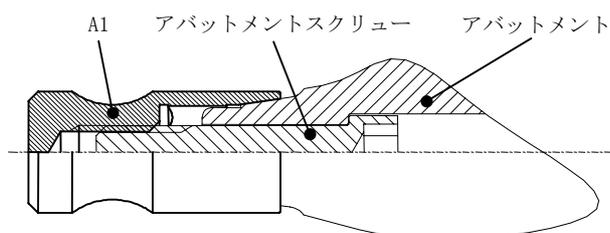

SRアバットメントポリッシングキャップ

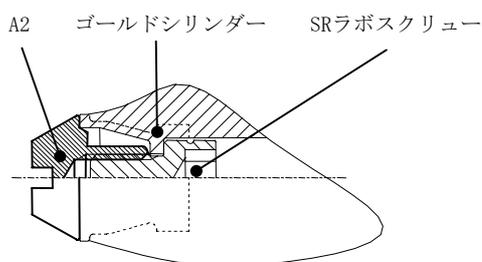

【材質】

部位	名称	原材料と金属材料
A1	ポリッシングキャップ	ステンレス鋼
A2	SRアバットメント ポリッシングキャップ	

【部品名】

ポリッシングキャップ Narrow
ポリッシングキャップ Regular/Wide
SRアバットメント ポリッシングキャップ φ3.8
SRアバットメント ポリッシングキャップ φ4.8
SRアバットメント ポリッシングキャップ φ6.0

【原理】

インプラントのアバットメント嵌合部と同じ形状を有し、耐摩耗性を有する材料で作製することにより、アバットメントと一体となった補綴物を研磨する際に、アバットメント等のインプラントとの接触面を保護する。
またSRアバットメントのゴールドシリンダー嵌合部と同等の形状を有し、耐摩耗性を有する材料で作製することにより、ゴールドシリンダーと一体となった補綴物を研磨する際に、ゴールドシリンダーのSRアバットメントとの接触面を保護する。

【使用目的又は効果】

本品は、顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

【使用方法等】

ポリッシングキャップの場合

インプラントガイドピンなどを用いて、本品に補綴物を構成するアバットメントを締結して、補綴物の研磨を行います。

SRアバットメント ポリッシングキャップの場合

SRアバットメントガイドピンなどを用いて、本品に補綴物を構成するゴールドシリンダーを締結して、補綴物の研磨を行います。除去の際は、底部の溝をドライバーに嵌合させて固定し、ガイドピンなどを緩めます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ポリッシングキャップをアバットメントに装着する際には、間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で行うこと。
- 2) SRアバットメント ポリッシングキャップをゴールドシリンダーに装着する際には、間に付着物などの介在がなく、完全に適合していることを確認した上で行うこと。
- 3) 本品を取り扱う際には、他のコンポーネントとの接触面などに傷を付けないよう注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ② 本品の使用に際しては、使用前にジーシーインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシーインプラントAadvaマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
 - ③ 開封後の本品に、損傷がないことを確認してから使用すること。損傷などが認められた場合には、使用を中止すること。
 - ④ 本品を再使用する際に損傷などが認められた場合には、廃棄し、新しい製品を使用すること。
 - ⑤ 本品は、専用のコンポーネントに対して使用すること。
 - ⑥ 本品の形態変更、改造などをしないこと。
 - ⑦ 製品の仕様は、改良のためお断り無く変更することがありますのでご了承ください。
 - ⑧ 本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントAadvaマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温、多湿、直射日光を避けて保管する。〔汚染及び錆を防ぐため〕
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

詳細については取扱説明書等を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 消毒剤及び洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い、正しく使用する。

消毒剤は下記のものをお薦めします。

- ・グルタラール製剤（ハイドリッド[®]20w/v%液など）、グルコン酸クロルヘキシジン（5%ヒビテン[®]液など）、防錆効果のある四級アンモニウム塩系消毒剤（塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなど）

下記の消毒剤は、錆・変色の影響が高いため使用できません。

- ・過酢酸製剤（アセサイドMA 6%消毒液など）、塩素系消毒剤（次亜塩素系ナトリウムなど）、過酸化剤系消毒剤（オキシドール、強酸性水など）、防錆効果のない四級アンモニウム塩系消毒剤（塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなど）、防錆効果のない両性界面活性剤系消毒液

洗浄剤は下記のものをお薦めします。

防錆効果のある洗浄剤、酵素系洗浄剤（ハイジーンウォッシュなど）

- 2) 洗浄を行った後には、錆の発生を防止するため、直ちに水気を拭き取り保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480