

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

ジーシー インプラント ロケーターアタッチメント 技工用コンポーネント (アナログφ4、アナログφ5、プロセッシングスペーサー)

【形状・構造及び原理等】

アナログは、模型上でロケーターアバットメントの位置及び形状を再現するための代替品である。ロケーターアバットメントと同じ構造をもつ上部、及び模型内の維持部からなる。プロセッシングスペーサーは、アナログとの嵌合部を持つ概略凹形状である。



アナログ

プロセッシングスペーサー

【材質】

名称	原材料と金属成分
アナログ	アルミニウム合金
プロセッシングスペーサー	ポリオキシメチレン

【部品名】

- ・アナログφ4mm
- ・アナログφ5mm
- ・プロセッシングスペーサー

【原理】

アナログ
ロケーターアバットメントのアタッチメントとの嵌合部と同じ形状を有し、技工作業時にロケーターアバットメントの代替とする。

プロセッシングスペーサー

アナログ類に装着した状態で義歯を作製することにより、義歯床内にデンチャーキャップを固定するためのスペースを確保する。

【使用目的又は効果】

顎骨に直接埋入し咬合機能を回復させるインプラントシステムのうち、補綴物を作製するために用いる歯科技工用部品である。

【使用方法等】

- 1) ロケーターアバットメントにインプレッションコーピングを装着して印象を採得します。印象材中のインプレッションコーピングにアナログを装着して、通法により石こう模型を作製します。
- 2) 模型上のアナログにプロセッシングスペーサーを装着します。蟻義歯を作製し、流蟻、床用レジン填入・重合します。義歯が完成後、プロセッシングスペーサーをコアツールにて撤去します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を再使用する際には、他のコンポーネントとの接触面などに傷を付けないよう注意すること。また、損傷、汚れなどが認められた場合には、使用を中止すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ③ 本品の使用に際しては、使用前にインプラントセミナー等に参加し、必要な知識及び技術を確実に習得すること。また、必ずジーシーインプラントシステムマニュアルを参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
- ④ 本品は、開封前の包装に損傷、破損のないことを確認の上で使用すること。
- ⑤ 開封直後の本品に、損傷、汚れなどが無いことを確認の上で使用すること。
- ⑥ ②、③について損傷、汚れなどが認められた場合には、使用を中止すること。
- ⑦ 本品は、専用のコンポーネントに対して使用すること。
- ⑧ 本品は、【使用目的又は効果】及びジーシーインプラントシステムマニュアルに記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 汚染及び変色を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理する。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 水分が付着したまま保管しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480