

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 (70904000)

ジーシー 歯面清掃研磨パウダー

【禁忌・禁止】

1. 減塩食事療養中の患者及び呼吸器系の障害のある患者には歯面清掃器を使用しないこと。
2. 本材、類似成分の製品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
粉末 白色

** 2. 主成分

種類	主な組成
レモンテイスト	炭酸水素ナトリウム、サッカリンナトリウム、レモン香料
+	エリスリトール 塩化セチルピリジニウム(微量)

3. 原理

歯面清掃器を用いて、水流及び空気流で本粉体を吹き付けることにより歯面を清掃・研磨する。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 使用する歯面清掃器の使用説明書に従い使用する。
 - 2) 歯面清掃器のメインスイッチが切れていることを確認する。
 - 3) パウダーのボトルのキャップを外し、パウダーを歯面清掃器の容器に入れる。
 - 4) パウダーのボトルのキャップを締め、保管条件を守って正しく保管する。
 - 5) 歯面清掃器のメインスイッチを入れる。
 - 6) 歯面を清掃・研磨する。
 - 7) 歯面清掃器のメインスイッチを切る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 開封後、本材が湿気を帯びている場合は使用しないこと。使用する歯面清掃器の故障の原因になります。
- 2) 本材を扱う際には、目を傷つけないように、保護めがねなどを使用すること。
- 3) 内容物を廃棄する場合は、水で希釈し、中和後排水すること。容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - 1) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - 2) 消化器系に障害のある患者には専用パウダー(+)を大量に使用しないこと。
 - 3) 呼吸器系に障害のある患者には歯面清掃器を使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - 2) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
 - 3) 本材は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

- 4) 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 開封後はキャップをしっかりと締め、保管条件を守って正しく保管すること。
- 2) 使用後はキャップをしっかりと締め、保管条件を守って正しく保管すること。


保管条件

種類	周囲温度	相対湿度
レモンテイスト	~30℃	~90%
+	~25℃	~90%

- 2) 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

- 1) 本材は、包装に記載の使用期限*までに使用すること。

※(例)  02 2015 は
use by 使用期限2015年 2月を示す。
[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー
発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：(お客様窓口) 0120-416480