

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ（16184000）
ジーシー PTCカップⅡ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：歯面清掃用カップ

構造：カップ部（合成エラストマー）とスクリュー部（真鍮）からなる。

原理：本品カップ部は柔軟で辺縁部と内面にデザインパターンを有し、スクリュー部をマンドレルに装着し、ハンドピースに装着し、回転させることによって歯面部などの清掃・研磨を行う。

【使用目的又は効果】

歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる、通常、ゴム製の器具をいう。本品は歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

- 1) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行います。
洗浄・滅菌：洗浄、乾燥を行った後、オートクレーブでの滅菌は 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分又は 134℃で 3 分のいずれかの条件（日本薬局方、IS017665 等に準拠）で行います。
ただし、乾燥工程が 135℃を超えてしまう場合は、乾燥工程を省きます。薬剤での滅菌は、各製造業者の指示に従って行います。
- 2) PTCカップをスクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースに取り付けます。
スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースがない場合は、別売の PTCマンドレルを PTCカップのネジ部分にはめ込み、通常のラッチコントラハンドピースに装着して使用します。
- 3) PTCカップに PTCペースト（歯面研磨用ペースト）を適量塗布し、5,000 回転数/分以下の回転数で歯面研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品はハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実にねじ込み、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 2) 本品を PTCマンドレルに装着して使用する場合は、本品をマンドレルに最後まで確実にねじ込んだ後、ハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実に挿入し、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 3) 使用前に口腔外で予備回転を行ない、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 洗浄には酵素系洗浄剤を使用し、薬剤での滅菌は以下の薬剤は使用しないこと。
 - ・過酢酸製剤
 - ・グルタラル製剤
 - ② 破損や口腔内を傷つける原因になるので、5,000 回転数/分を超えた回転数、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

- ③ 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、術者及び患者は保護眼鏡などを使用すること。
- ④ モーターを逆回転（左回転）させるとハンドピースから外れる恐れがあるため、必ず正回転（右回転）で使用する。
- ⑤ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

- ・直射日光を避け、室温にて保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480