


機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
オルソリー ミキシングチップ S L

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：

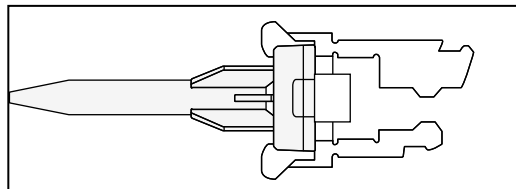

先端内径	全長
1mm	63mm

40 本入り

材質：

名称	材質
ハウジング	ポリプロピレン
ミキシングエレメント	ポリオキシメチレン
エアカップ	ポリプロピレン
クリップホルダー	ポリプロピレン

原理：カートリッジから押し出された材料がオルソリー ミキシングチップ S L 内のミキシングエレメントにより攪拌練和される。

【使用目的又は効果】


歯科用合着材の練和に使用する。

【使用方法等】

準備


C D ディスペンサーにカートリッジを装着します。キャップ取り外し後、両シリンジからペーストを少量押し出してすり切り、両シリンジのペースト位置を合わせます。

- 1) オルソリー ミキシングチップ S L をカートリッジに最後まで押し込み（下図①）、スリーブの側面を持ち、前方にスライドさせて（下図②）オルソリー ミキシングチップ S L を装着します。

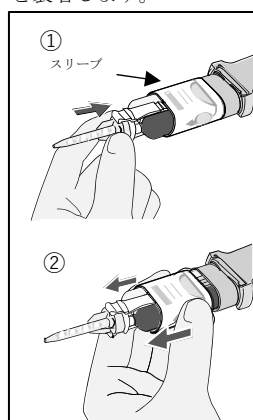

- 2) C D ディスペンサーのレバーを押し込み、材料を押し出します。

- 3) 押し出し後、スリーブを後方にスライドさせてから（下図①）、オルソリー ミキシングチップ S L を取り外し（下図②）、キャップを装着します。

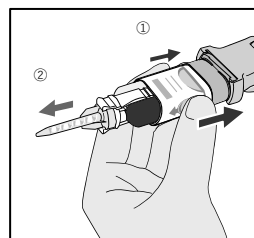

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) カートリッジにオルソリー ミキシングチップ S L が確実に装着されていることを確認してから押し出すこと。
- 2) 材料を急激に押し出すと、オルソリー ミキシングチップ S L が外れる恐れがあるので、ゆっくりレバーを押し込むこと。
- 3) 無理な力や角度で装着・脱着を行わないこと。
- 4) 本品を用いる場合、接合部に手指を挟まないように注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 使用後のオルソリー ミキシングチップ S L を、カートリッジに装着したまま保管しないこと。
 - ② 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ③ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- 2) 直射日光を避けて保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシーオルソリー
住所：〒174-8585
東京都板橋区蓮沼町 76 番 1 号
電話番号：（お客様窓口）0120-108-171