


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）
カプセルミキサー CM-II

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

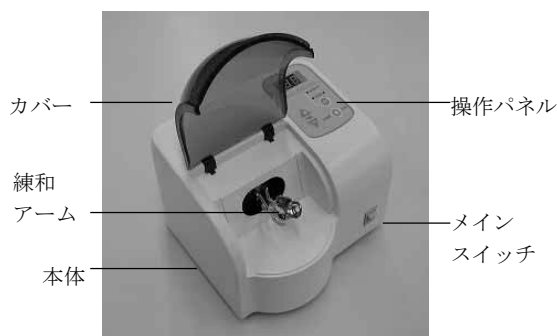

2. 寸法及び質量

幅 190mm×奥行 180mm×高さ 150mm

質量：2.7 kg

3. 電氣的定格

電源電圧：DC24V

電源入力：50VA

電源アダプター電氣的仕様：

入力側 AC100V 50/60Hz

出力側 DC24V 1.5A

電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器

4. 原理

材料を入れたカプセルは、本器のアームに取り付けられる。このアームは内部のモーターに連結されており、モーターの回転によりアームをゆする運動をし、内容物を混ぜ合わせる。

【使用目的又は効果】

歯科用セメントを練和する。

【使用方法等】

1. 設置方法

- (1) モーター固定ネジを底面から取り外す。
- (2) 電源アダプターと本体を接続する。
- (3) 電源アダプターと電源コードを接続し、コンセントに接続する。
- (4) 本体のメインスイッチを ON にする。

2. 使用方法

・詳細については使用前に付属の使用説明書を必ず読むこと。

- (1) 練和するカプセル製品の特性に合わせて、操作パネルの練和時間を確認する。
- (2) 練和するカプセルを練和アームに装着する。
- (3) カバーを完全に閉じる。
- (4) 操作パネルの Start スイッチを押し、練和を開始する。
- (5) 練和されたカプセルを取り出す。
- (6) 練和終了後、メインスイッチを OFF にする。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 傾斜、振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態に設置すること。
- (2) 本体・電源アダプターを直射日光に曝さないこと。
- (3) 電源アダプターと本体を接続する際、しっかり差し込むこと。
- (4) 電源コードをコンセントに接続する際、しっかり差し込むこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 分解、改造は絶対にしないこと。
- (2) 使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- (3) 練和中異常が発見された場合には直ちにメインスイッチを OFF にすること。
- (4) 故障の原因となるため、カプセルを装着せずに作動しないこと。
- (5) 歯科材料、薬品、溶剤が本体に付着した場合は、速やかに乾いた布で清掃、除去すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 耐用期間

- (1) 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後 5 年とする。〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- (1) 清掃時には、必ず電源アダプターのプラグを抜くこと。
- (2) 本体の清掃は柔らかい布に水かぬるま湯、又は石鹼水をつけ、よく絞ってから拭くこと。洗浄剤や可燃性の液体は避けること。
- (3) 電源アダプターの清掃は乾いた布で行うこと。
- (4) 電源プラグは確実に接続されていることを定期的に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480