

機械器具 6 2 歯科用切削器
高度管理医療機器 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材（70709000）

ティオン ホーム ウィズ

【禁忌・禁止等】

下記の患者には本品を使用しないこと。

- ・無カタラーゼ症の患者〔過酸化物を分解できない〕
- ・妊娠中、授乳期の女性
- ・小児
- ・重度の歯肉炎や歯周炎を有する患者
〔症状を悪化させる可能性〕

- ・ポリオレフィンに対し、アレルギー反応が見られる患者

下記の歯に本品は使用しないこと。〔症状を悪化させる可能性〕

- ・健全でない歯（う蝕、くさび状欠損、咬耗症、クラック等）
- ・知覚過敏を有する歯

本品は就寝中に使用しないこと。

本品を用いてウォーキングブリーチ法を行わないこと。

本品を用いて髄室内からの処置を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

ホームホワイトニング材：

白色のジェルでシリンジ 1 本 1.8 mL の内容量

トレーシート：

128 mm×128 mm×1 mm の半透明のシート

〔成分・組成〕

ホームホワイトニング材：

〈主成分〉 過酸化水素 6%

〈添加物〉 多価アルコール

粘度調整材

pH 調整材他

トレーシート：水添スチレン・イソブレンブロック共重合体

〔原理〕

ホームホワイトニング材に含まれる過酸化水素が、唾液との接触や体温により分解して変色物質を酸化し、着色歯面の清掃を補助する。

【使用目的又は効果】

機械的歯面清掃後に用いる着色歯面の清掃補助

〔適用部位〕

成人 6 前歯：健全歯のみであり、くさび状欠損を含む修復処置を必要としない歯面、又は処置が行われていない歯面

〔適用症例〕

- 1) 加齢による変色歯
- 2) コーヒー、茶、タバコ等による変色歯（歯面研磨材で除去できない変色歯）
- 3) 色素生成細菌による変色歯（歯面研磨材で除去できない変色歯）
- 4) 全身疾患に由来する変色歯（着色が軽度で形成不全を伴わない変色歯）

〔使用目的又は効果に関連する使用上の注意〕

- 1) 処置前に必ずインフォームドコンセントを得て、使用方法、使用上の注意事項等について説明すること。
- 2) 治療計画を立てる前に、問診及び口腔内検査を実施し、適応症か禁忌症かを診断すること。
- 3) 本品を使用した場合、歯の色が安定するのに約 2 週間ほど要するので、審美修復、接着修復は、本品を使用しての治療の 2 週間後に開始すること。

【使用方法等】

〔用法・用量〕

適合したマウストレー（カスタムトレー）にホームホワイトニング材を最大 1 目盛りを目安に注入し、処置を行う歯列に装着する。装着は、1 日 1 回、標準 60 分を目安に、最長 90 分、処置期間は最長 10 日間までとする。

〔使用方法〕

- 1) 患者に使用方法についての説明を行う。患者が本添付文書の禁忌、禁止事項に該当する場合は、本品を使用できない旨の説明を行う。
- 2) 口腔内全体の診査と適応症についての確認を行う。
- 3) 歯の色の診査を行う。
- 4) 機械的歯面清掃を行う。
- 5) 対象歯列を含む歯列の全顎印象を採得し、下記（カスタムトレー作製方法）に従い、カスタムトレーを作製する。
- 6) カスタムトレーを患者に試適させ、装着具合を確認する。不具合箇所があった場合には、修正を行う。
- 7) 患者に本品の使用方法を指導する。
 - ① カスタムトレーの対象歯の唇側面に相当する部分へ 1 歯ずつシリンジから注入する。1 回あたりの注入量は 1.8 mL 入りシリンジの 1 目盛りを最大量とする。
 - ② ①で本品を注入したカスタムトレーを、1 日 1 回、標準 60 分を目安に、最長 90 分装着する。装着時に本品がはみ出した場合には、脱脂綿やティッシュペーパーで拭き取る。
 - ③ 処置後、カスタムトレーを外し、歯面に付着したホームホワイトニング材を歯ブラシで取り除き、口腔内に溜まったホームホワイトニング材と唾液を吐き出し、口腔内を十分にすすぐ。その後、ブラッシングを行う。
 - ④ 外したカスタムトレーを、流水下で歯ブラシを用いて清掃し、水分を脱脂綿やティッシュペーパーで拭き取り、ケースに戻し保管する。
- 8) 患者は自宅等において、7) に従い処置を行う。

〔カスタムトレー作製〕

- 1) 石こう模型を作製し、適合性の高いカスタムトレーを作製するために、石こう模型の口蓋部分を削って U 字型にトリミングする。
- 2) 加熱吸引成型器に上記模型とトレーシートをセットし、カスタムトレーの成形を行う。
- 3) 成形後、カスタムトレーが室温程度に冷えたのを確認後、作業模型を加熱吸引成型器から取り出し、臨床的歯頸線に合わせてカッティング、トリミングを行う。
- 4) カットされた部分にバリがないように丁寧に仕上げ、作業模型上で適合を確認する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 歯科医師若しくは歯科医師の管理下にある歯科衛生士が患者説明用文書を用いて使用方法や注意事項、処置時間・期間等の説明を患者に充分に行うこと。
- 2) 処置前の歯の色を、その色と近似したシェードガイドと並べて、カラー写真で撮影しておくこと。（処置後に、患者に効果を示すため）
- 3) 誤飲の可能性があるため、就寝中の使用を行わないように充分指示すること。
- 4) ホームホワイトニング材が口腔内にあふれたときは、飲み込まずに吐き出すこと。また、患者にその旨を指示すること。
- 5) ホームホワイトニング材は必ずトレーを介して使用し、シリンジを直接口腔内に入れて使用しないことを患者に指導すること。

- 6) ホームホワイトニング材が衣類等に付着した場合は、脱色される可能性があるので素早く拭き取る。また、その旨を患者に指導すること。
- 7) 誤使用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。また、患者にもその旨を指示すること。
- 8) カスタムトレー作製時の加熱は、取扱説明書を良く読み、必要以上に加熱を行わないこと。
- 9) カスタムトレー作製時には、樹脂の蒸気や粉塵の吸引を避けるため、作業所内は適度に換気すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①処置中及び処置後に、痛み、疼痛、歯周組織の異常、知覚過敏等の症状が発生したときは、直ちに処置を中止するよう指導を行うこと。また、そのような場合には、担当歯科医師に連絡するように指導すること。
 - ②本品により発疹及び皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し医師の診察を受けること。また、その旨を患者にも指導すること。
 - ③金属イオンによる着色及び先天的変色歯には十分な効果が得られないので、慎重に使用すること。
 - ④石灰化不全の領域は、他の箇所に比べて早く効果が現れるので注意すること。
 - ⑤トレーシート、カスタムトレーは高温（熱湯、熱源の近く、直射日光が当たる等、45℃を越す場所）に放置や保管、洗浄すると変形する恐れがあることから、避けること。また、その旨を患者に指示すること。
 - ⑥ホームホワイトニング材は、刺激性があるので、皮膚や軟組織への付着や、目に入らないように注意すること。皮膚や軟組織に付着した場合は、大量の水で洗い流すこと。万一目に入った場合には直ちに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けること。また、患者にその旨を指導すること。
 - ⑦適切な効果を得るため、処置期間中および処置後 24 時間以内は、色の濃い飲食物（コーヒー、カレー、赤ワイン等）の摂取、喫煙は避けるように指導すること。
 - ⑧効果を持続するために、患者の口腔内環境に合ったブラッシング指導を行い、励行させること。
 - ⑨使用期間終了後、半年から 1 年後には予後の観察を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、歯科医療従事者もしくは、患者以外が触れないように適切に保管・管理する。

	保管条件
セット品	保管条件：2～8℃（冷蔵庫）
単品	保管条件：2～8℃（冷蔵庫）
トレーシート	保管条件：室温で保管

〔有効期限〕

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2028-11 は
使用期限 2028 年 1 月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー

主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480