


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材（70903000）
ジーシー ブラウンシリコンポイント

【形状・構造及び原理等】

形態

- ・7種=103、113、104、114、115、128、110（H.P.用）

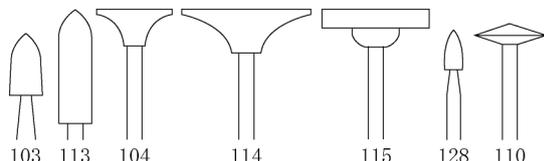

原理

シリコンゴム基材部に混練させた砥粒により研磨を行う。

材質

- ・軸部：ステンレス鋼
- ・作業部：シリコンゴム、研磨材

仕様

- ・軸部：2.34mmφ JIS T 5504 軸部形式2（H.P.用）
- ・作業部：砥粒粒度：#320以下

【使用目的又は効果】

金合金、パラジウム合金、銀合金等の歯科用金属による各種金属補綴物の研磨（荒仕上げ用）に使用する。

【使用方法等】

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、指定した使用回転数で使用します。

- ・指定使用回転数

形態	(回転数/分)
103、113、104、128、110	30,000以下
114、115	10,000以下

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認してから使用すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部が細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 表示使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、表示使用回転数を厳守すること。
- 5) シャンクに損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- 6) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- ②塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わないこと。また、その他の消毒薬で長時間浸漬する場合は錆びる恐れがあるので、防錆剤を添加すること。
- ③本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ②本品の使用により発疹などの過敏症を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理する。
- ・本品は、錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480