


機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）

ジーシー カートリッジディスペンサーⅡ

【形状・構造及び原理等】

形状：

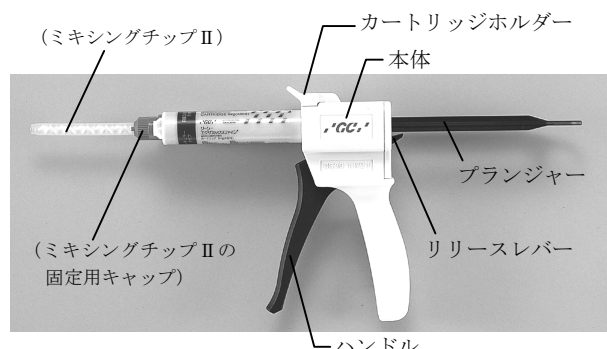


原理：ハンドルを握るとプランジャーが繰り出され、カートリッジ内のペーストを押し出す。

【使用目的又は効果】

ジーシー カートリッジディスペンサーⅡに対応した各種製品（カートリッジタイプ）の練和物の押し出しに使用する。

【使用方法等】


- 1) ディスペンサーのリリースレバーを押し上げて、プランジャーを手前一杯まで引きます。
- 2) ディスペンサーのカートリッジホルダーを引き上げて、カートリッジ底部のV字溝のある側を下にしてディスペンサーに装着し、カートリッジホルダーを押し下げカートリッジを固定します。

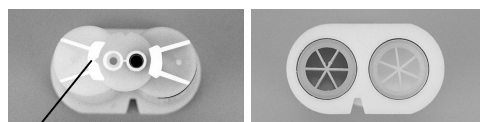

カートリッジ
先端のV字溝

カートリッジ
底部のV字溝

- 3) リリースレバーを押し上げ、プランジャーをカートリッジとかみ合うところまで手で押し込みます。
- 4) カートリッジのキャップを反時計回りに1/4回転させてから下方向に折るようにして取り外し、少量押し出してカートリッジ先端よりベースとキャタリストが均等に出ることを確認します。
- 5) ミキシングチップⅡをカートリッジ先端のV字溝に合わせて挿入し、奥まで押し込みます。さらにミキシングチップⅡ固定用キャップ部をカートリッジに対して時計方向に1/4回転させて確実に装着します。

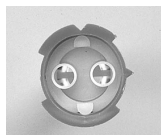

ミキシングチップⅡ
の固定用キャップ

- 6) ハンドルを数回操作し、材料を押し出します。使用後は、ミキシングチップⅡがそのままキャップの代わりになります。ミキシングチップⅡ交換の際は、キャップと同様にミキシングチップⅡの固定用キャップ部を反時計回りに1/4回転させてカートリッジ先端のV字溝に合わせて、下方向に折るようにして取り外してください。

- 7) 2回目以降の使用に当たっては、新しいミキシングチップⅡを装着する前に少量押し出し、カートリッジ先端よりベースとキャタリストが均等に出ることを確認します。もし、印象材が出ない場合は、カートリッジ先端の硬化した印象材を除去してください。
- 8) カートリッジを交換する場合は、リリースレバーを押し上げてプランジャーを手前一杯まで引き、カートリッジホルダーを引き上げてカートリッジを取り替えます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) カートリッジ及びミキシングチップⅡが確実に装着されていることを確認してから、印象採得を行なうこと。
- 2) 本品を用いる場合、ハンドルに手指をはさまないように注意すること。
- 3) 使用した後は、ミキシングチップⅡがそのままキャップの代わりになるが、キャップに付け替えて保管する場合は、左右のペーストが接触しないように注意すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
- ② 印象材を急激に押し出すと、カートリッジが割れる恐れがあるので、静かにハンドルを握って印象材を押し出すこと。
- ③ ディスペンサーの樹脂部は132℃を越えると変形する恐れがあるので、滅菌器の温度を132℃を超えて上昇させないこと。
- ④ 清掃液・消毒液・滅菌器については、各業者の指示に従い、正しく使用すること。
- ⑤ オートクレーブでの滅菌後は、ディスペンサーが完全に冷えてから使用すること。
- ⑥ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

【保管方法】

- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480