

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)
ジーシー ミキシングチップⅡ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*

形状：

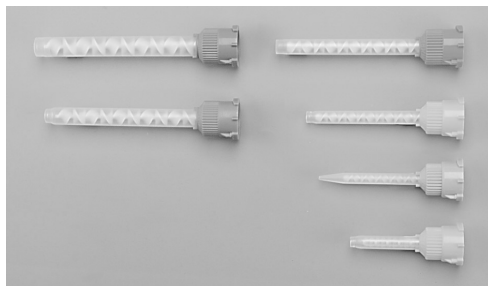

サイズ	先端の内径
L L (パープル)	6.4mm
L (グリーン)	4.8mm
S (ピンク)	4.8mm
S S (イエロー)	3.6mm
S S S (ブルー)	1.0mm
S S ショート (イエロー)	3.6mm

材質：

- ・ミキサーハウジング：ポリプロピレン、EP ポリマー
- ・固定キャップ：ポリプロピレン
- ・ミキシングエレメント：ポリアセタール、ポリプロピレン


原理：カートリッジから押し出された材料が、ミキシングチップ内にある羽根により攪拌練和される。

【使用目的又は効果】


ジーシー カートリッジディスペンサーⅡに対応した各種製品（カートリッジタイプ）の練和に使用する。

【使用方法等】

- 1) カートリッジのキャップを反時計回りに1/4回転させてから、下方向に折るようには取り外し、少量押し出してカートリッジ先端よりベースとキャタリストが均等に出ることを確認します。
- 2) ミキシングチップⅡをカートリッジ先端のV字溝に合わせ、奥まで押し込みます。さらにミキシングチップⅡ固定用キャップ部を、カートリッジに対して時計方向に1/4回転させて確実に装着します。

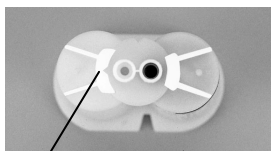

カートリッジ
先端のV字溝

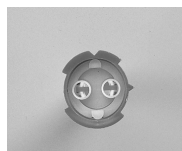

ミキシングチップⅡ
の固定用キャップ

- 3) カートリッジディスペンサーⅡのハンドルを数回操作し、材料を押し出します。使用後は、ミキシングチップⅡがそのままキャップの代わりになります。ミキシングチップⅡ交換の際は、キャップと同様にミキシングチップⅡの固定用キャップ部を反時計回りに1/4回転させてカートリッジ先端のV字溝に合わせ、下方向に折るようには取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) カートリッジにミキシングチップⅡが確実に装着されていることを確認してから、印象採得を行うこと。
- 2) 無理な力や角度で、装着・脱着を行わないこと。
- 3) 本品を用いる場合、接合部に手指を挟まないように注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
 - ② 印象材を急激に押し出すと、カートリッジ、ノズルが割れる恐れがあるので、静かにハンドルを握って印象材を押し出すこと。
 - ③ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

【保管方法】

- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480