

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)
(歯面研磨材 70904000)

ジーシー ダイアポリッシュャーペースト

【禁忌・禁止】

本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要：本品は、コンポジットレジン等のレジン材料の艶だし研磨、歯面の汚れやプラーク落としに用いる研磨材である。

形状：ペースト 2 g

主成分：ダイヤモンド、グリセリン、酸化亜鉛、シリカ微粉末、キシリトール、パラベン、香料

原理

・ペーストに含まれるダイヤモンド砥粒等により、レジン表面等を研磨する。


【使用目的又は効果】

- 1) 歯冠用硬質レジン、充填用コンポジットレジン等の補綴物、充填修復物表面の艶だし研磨に用いる。
- 2) 歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1) 前準備*

フィリングチップは脱落防止の為
回しながらしっかりと装着します。

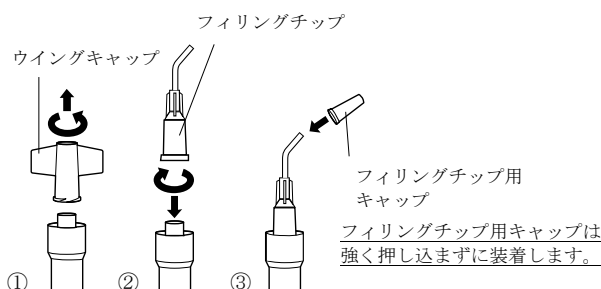

- ① シリンジ本体を上に向け、ウイングキャップを反時計回りに回しながら外します。
 - ② 速やかにフィリングチップを時計回りに回しながら装着します。
 - ③ フィリングチップ装着後、ご使用になるまでゴミ等が入らないようにフィリングチップの先端にフィリングチップ用キャップを装着します。
- #### 2) コンポジットレジンの場合
- ① 充填、形態修正後の最終研磨に使用します。(シリコーンポイント等で中研磨後に行くと効率的です)
 - ② 本品をブラシ、フェルト等の歯科用研磨器具に適量付けて、各歯科用研磨器具の添付文書等に定められている回転速度(上限は 10,000 回転数/分以下)で仕上げ研磨を行います。
 - ③ 研磨後は水洗してペーストを除去してください。
- #### 3) 硬質レジン歯科補綴物の場合
- ① 形態修正後の最終研磨として、また定期的なメンテナンス時の艶だし研磨に使用します。
 - ② 本品をブラシ、フェルト等の歯科用研磨器具に適量付けて、各歯科用研磨器具の添付文書等に定められている回転速度(上限として 10,000 回転数/分以下)で仕上げ研磨を行います。
 - ③ 研磨後は水洗してペーストを除去してください。
- #### 4) 歯面の場合
- ① 歯面の汚れやプラーク落としに使用します。
 - ② 本品をブラシ、フェルト等の歯科用研磨器具に適量付けて、各歯科用研磨器具の添付文書等に定められている回転速度(上限は 5,000 回転数/分以下)で歯面研磨を行います。
 - ③ 研磨後は水洗してペーストを除去してください。

【使用方法等に関する使用上の注意】

- 1) フィリングチップは、オートクレープ・ケミクレープにはかけられないので注意すること。
- 2) フィリングチップ装着時は、ペーストがシリンジとのかん合部に付着していると、使用時にフィリングチップが抜け落ちることがあるので、ペーストの付着がないことを確認すること。
- 3) フィリングチップを使用する際は、患者及び術者は保護めがねを使用すること。
- 4) 本品をロビンソンブラシ、フェルト又はパフ等に付着させる際に本品が飛び散る恐れがあるので保護めがねを着用し、レジン材料の場合には 10,000 回転数/分以下、歯面の場合には 5,000 回転数/分以下で使用する。(回転速度が低すぎると艶だしに時間がかかる場合があります。)
- 5) ロビンソンブラシ等を強く押し当てすぎると、レジン面が変形したり、摩擦熱を生じやすいので注意すること。
- 6) 液成分が徐々に分離する可能性があります。品質には影響ありません。ペーストが硬い場合には、水で調整すること。
- 7) 強い力で急激に押し出すとペーストが必要以上に飛び出る恐れがあるので、ゆっくりと押し出すこと。
- 8) フィリングチップを使用する際は、確実にシリンジに装着したことを確認すること。
- 9) 使用後は速やかに本品を水洗すること。
- 10) 必ずキャップを閉めて保管すること。
- 11) コンポジットレジン等を研磨する場合には、必ずレジン研磨用のブラシ、パフ等を用いること。(PTC 器材を使用して研磨するとレジン表面にキズがつくことがあります。)

【使用上の注意】

- 1) 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - ① 薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止しすぐに医師の診断を受けること。
 - ③ 本品が万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
 - ④ 本品を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
 - ⑤ 本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために保護めがね等を使用すること。
 - ⑥ 本品を直接素手で触れないこと。また、皮膚に付着させたり、目や鼻等に入らないように注意すること。
 - ⑦ 他の製品と混用しないこと。
 - ⑧ 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑨ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温・直射日光を避け、冷暗所(4～25℃)で保管する。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480