

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

ジーシー グラディア ダイヤポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

概要：本品は、硬質レジンの艶だし研磨に用いる研磨材である。
形状
ダイヤモンド研磨材（ワックス基材） 8 g
原理
ワックス基材に混練させた砥粒により研磨を行う。
主成分
人工ダイヤモンド、ワックス、酸化亜鉛、シリカ微粉末

【使用目的又は効果】

本品は、ロビンソンブラシ、フェルト又はバフ等につけて、硬質レジン歯科修復物の艶だし研磨に使用する。

【使用方法等】

- 1) 艶だし
①シリコーンポイント等で、研磨後の艶だし研磨に使用します。
②回転させたロビンソンブラシに本品を付着させ、高回転（12,000～15,000 回転数/分）で艶だしを行います。
- 2) 最終バフ研磨
回転させたフェルト又はバフ等に本品を付着させ、高回転（12,000～15,000 回転数/分）で艶だし研磨を行います。
- 3) 研磨後、スチームクリーナーまたは中性洗剤を用いて超音波洗浄機で洗浄し、本品を除去します。
※洗浄後、艶が落ちるようでしたら、上記 1) ～ 3) のステップをやり直します。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) 本品とともに使用するロビンソンブラシ、バフなどは、ジーシーグラディア、ジーシー グラディア フォルテの専用とすること。他のポーセレン用研磨材等と混用すると、艶が出ないことがあるので注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本品をロビンソンブラシ、フェルトまたはバフ等に付着させる際に本品が飛び散る恐れがあるので、保護メガネ等を使用すること。
④本品を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
⑤本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
⑥本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。
⑦他の製品と混用しないこと。
⑧本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】
・本品は、高温・直射日光を避け、室温で保管する。
・本品を、高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所など）に放置しない。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480