

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（70682000）

ジーシー ミキシングチップフラットノズル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：先端内径（短径）：1.5mm



材質：高密度ポリエチレン

原理：ミキシングチップ内で搅拌練和された材料が本品を通して平たい形状に押し出される。

【使用目的又は効果】

練和物を平たい形状にて押し出すため、ジーシー ミキシングチップⅡ（S及びL）の先端に装着して使用します。

【使用方法等】

- 1) ミキシングチップⅡ（SまたはL）の先端に本品を押し込み、装着します。
- 2) ノズルは注入する方向に自在に向きを変えることができるため、装着方向を確認した後、練和物を押し出します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ミキシングチップⅡ（SまたはL）に本品が確実に装着されていることを確認してからカートリッジに装着すること。
- 2) カートリッジにミキシングチップⅡ（SまたはL）が確実に装着されていることを確認してから押し出し練和を行うこと。
- 3) 無理な力や角度で装着を行わないこと。
- 4) 本品を用いる場合、接合部に手指を挟まないように注意すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
- ② 印象材を急激に押し出すと、カートリッジ、ノズルが割れる恐れがあるので、静かにハンドルを握ってカートリッジよりペースト押し出すこと。
- ③ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

[保管方法]

- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- ・ 直射日光を避けて保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480