

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス 70893000
シープ パラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

- 1) 形状：76mm（幅）×146mm（長さ）×1.4mm（厚さ）の板状ワックス
- 2) 成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、その他

【使用目的又は効果】

義歯床の仮床、咬合採得、仮着のスペーサーなどに用いる。

【使用方法等】

- 1) 義歯床のワックス形成
 - ①板状のワックスを炎で加熱し適度に軟化させたところでロール状に巻いて棒状にします。
 - ②棒状にしたワックスを馬蹄形にして、基礎床に圧接していきます。
 - ③過不足部分は盛り足したり、削ったりして咬合堤を完成します。
 - ④咬合堤の調整、人工歯の排列、ロウ義歯の制作は、通法に従い作業します。
- 2) 咬合採得の場合
 - ①パラフィンワックスを均等に軟化させたものを、噛み合わせ、硬化してから取り外します。
 - ②その上に石こうを流して、石こう型とし咬合状態をみます。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本材は、可燃性であるので使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
 - ②過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	シープ歯科工業株式会社
住所	〒640-1121 和歌山県海草郡紀美野町下佐々1058
電話番号	073-489-4328