

C o r P a t h G R X ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染から機器を隔離するために、保護的なカバーとして用いる。本品は、単回使用である。

1. 制御コンソールドレープ



2. 関節アーム/ロボットドライブドレープ



【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染から機器を隔離するために、保護的なカバーとして用いる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

本品は、C o r P a t h G R X システムと組み合わせて使用する。

1. 制御コンソールドレープ
 - (1) 本品を制御コンソールの上に置き、制御コンソールの前面を覆う。
 - (2) 本品のサイド部分を広げ、インターベンショナル・コクピットを覆い、固定する。
 - (3) 本品のフロント部分を広げ、インターベンショナル・コクピットの前側を覆う。
 - (4) 制御コンソールの各ジョイスティックを本品で覆う。
2. 関節アーム/ロボットドライブドレープ
 - (1) 本品の折り畳みを展開する。
 - (2) 本品をロボットドライブに被せ、ベッドサイドタッチスクリーンを覆う。
 - (3) 本品の切り欠き部分をロボットドライブの突起に合わせ、固定する。
 - (4) ガイディングカテーテル・トラックランプホルダを本品で覆い、固定する。
 - (5) 本品で関節アームを覆う。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

販売名	医療機器承認番号
C o r P a t h G R X システム	23000BZ100017000

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

＜有効期間＞

5 年間[自己認証(当社データ)による]

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

シーメンスヘルスケア株式会社

電話番号: 0120-041-387

(カスタマーケアセンター)

製造元

コリンダス社(アメリカ合衆国)

Corindus, Inc.