

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

スーパースターV

【禁忌・禁止】

1. 目的以外には使用しない事。
2. 注意事項を必ず守る事。
3. 乾燥や劣化などの異常が見られた場合は使用を中止する事。
4. 本品に対して発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。

【形状・構造又は原理等】

形状：軟質固形体

組成：ダイヤモンド（合成）、酸化アルミニウム、脂肪酸等

色調：グレー

原理：研磨用ブラシ又はバフに付着させることで研磨できる。

【仕様】

- (1) 均一性：目視により均一なこと。
- (2) 夾雑物：目視により含まないこと。
- (3) 粉末度残量：150 μm 篩残 1%以下

【使用目的又は効果】

- ・ポーセレン専用最終艶出し研磨
- ・ジルコニア、キャストブルセラミック、ハイブリッド系硬質レジン
の艶出し研磨にも対応

【使用方法等】

- (1) 前の仕上げ研磨工程でポーセレン表面の傷を取り除き滑沢に
仕上げておきます。
- (2) 低速回転で硬質フェルトホイール、フェルトポイント、ポリ
ッシングブラシ等に本材を付着させます。
- (3) 通常回転に戻し、ポーセレン表面がグレージングと同等な光
沢が出るまで、発熱に注意しながら丁寧に研磨を行ってくだ
さい。
- (4) 最後に本材が付着していないフェルトホイール、フランチヤ
ーホイールを用い、ポーセレン表面を軽く研磨しますと、よ
り一層光沢が得られます。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- (1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場
合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けるこ
と。
- (2) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるた
め、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用
し、粉塵を吸入しないこと。

(3) 本材で研磨する際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等
を使用すること。

(4) 研磨作業後は、石鹸をつけたブラシ等で十分な手指の洗浄を
行うこと。

(5) 他の製品との混用を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

出来るだけ高温多湿の場所を避け、外圧及び汚染を受けないよ
うに保管すること。

〔有効期間〕

通常の貯蔵方法であれば、長期保存による品質変化は無いため、
使用期限は定めない。

※製造番号は (LOT NO) により表示してあります。

* 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：下村石膏株式会社

住 所：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町 32-1

電話番号：047-404-5056

FAX番号：047-404-5069

販 売 元：株式会社日本歯科工業社

住 所：〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8

電話番号：03-3836-2191

FAX番号：03-3836-2377