

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

マルチブルー煌

【禁忌・禁止】

1. 目的以外には使用しない事。
2. 注意事項を必ず守る事。
3. 乾燥や劣化などの異常が見られた場合は使用を中止する事。
4. 本品に対して発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。

【形状・構造及び原理等】

形状：ペーストタイプ

外観：夾雑物がなく、ブルーのペースト状

組成：酸化アルミニウム、ダイヤモンド、脂肪酸等

色調：ブルー

原理：研磨用ブラシ又はバフに付着させることで研磨ができる。

[仕様]

- (1) 均一性：目視により均一なこと
- (2) 夾雑物：目視により含まないこと
- (3) 粉末度残量：150 μ m篩残 1%以下

【使用目的又は効果】

ポーセレン、ハイブリッドレジン、ジルコニア等の補綴物の表面艶出し。

【使用方法等】

- (1) エンジンやレーズを低速回転にし、本材をブラシ又はバフに付着させてください。
- (2) エンジンやレーズを通常の回転速度に戻し、通法に従い研磨作業を行ってください。
- (3) 研磨終了後は、被研磨物を十分に洗浄して下さい。

【注】回転数・研磨圧・発熱等に十分注意しながら研磨を行います。

また、研磨中に研磨物表面温度上昇により光沢が鈍る事もありますので注意してください。

【注】研磨光沢度合いは、被研磨物の種類等で多少異なる事があります。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- (2) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- (3) 本材で研磨する際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用すること。
- (4) 研磨作業後は、石鹼をつけたブラシ等で十分な手指の洗浄を行うこと。

- (5) 本品の使用後は、乾燥を防ぐ為に必ずキャップを閉めて保管すること。

- (6) 他の製品との混用を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

出来るだけ高温多湿の場所を避け、外圧及び汚染を受けないように保管すること。

[有効期間]

通常の貯蔵方法であれば、長期保存による品質変化は無いため、使用期限は定めない。

*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業：下村石膏株式会社

住 所：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町 32-1

電話番号：047-404-5056

FAX 番号：047-404-5069

発 売 元：大栄歯科産業株式会社

住 所：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-10-17

電話番号：06-6441-3332

FAX 番号：06-6445-1276