

松風シリコンホイール

【形状・構造及び原理等】

〔構造〕

人造研削材（炭化けい素）を合成ゴムで結合したホイール状研磨材。

※※【使用目的又は効果】

歯科補綴装置等の研磨に用いる。

〔各タイプの推奨研磨対象〕

- ・Mタイプ：金合金、銀合金、パラジウム合金
- ・Pタイプ：陶歯、陶材

【使用方法等】

〔使用方法〕

本材を歯科用マンドレルに取付け、歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

※【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ※1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

種類	形態	最高許容回転速度
Mタイプ	7, 8	20,000min ⁻¹
Pタイプ	PA, PB	15,000min ⁻¹
	P1, P2, P3	20,000min ⁻¹

- 2) 変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風プロダクツ京都
住所 〒613-0022
京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1
電話番号 0774-41-1321

販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112