

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000
松風シリコンスティックハード

【形状・構造及び原理等】

〔構造〕

人造研削材（炭化けい素）を合成ゴムで結合した円柱状研磨材。

【使用目的又は効果】

歯科用硬質合金（ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金等）の補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

本材を歯科用マンドレルに取付け、歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 歯科用マンドレル(スティック専用)のナットの所まで確実にねじ込んで使用すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

※※【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ※※1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
15,000min ⁻¹

- 2) 変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者	株式会社 松風プロダクツ京都
※住所	〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1
※電話番号	0774-41-1321
販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112