

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ 16184000

松風ラバーカップ

【禁忌・禁止】

松風ラバーカップは、天然ゴムを使用しています。
天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある歯科
医療従事者の使用及び患者への使用は禁止すること。

【形状・構造及び原理等】

【構造】

- 1) 作業部：天然ゴムラテックス
- 2) 軸部：ステンレス鋼
軸部形式1：C A用

【使用目的又は効果】

アマルガム、インレー、クラウン及び義歯床の研磨に用いる。

※【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 本材を口腔内で使用する際には滅菌する。
- 2) 本材を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。
- 3) 口腔内で使用後、再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行う。

※滅菌方法：各種薬液による滅菌を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- 5) アマルガムの研磨の際は、注水下で発熱を避けて使用すること。また、研磨屑は確実に吸引すること。
- ※ 6) 再使用する際には、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、各種薬液による滅菌をすること。（オートクレーブ、ケミクレーブ又は乾熱滅菌は避けること。）
- 7) 塩素系消毒剤は使用しないこと。

※【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ※ 1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
15,000min ⁻¹

- 2) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。この様な症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な措置を施すこと。
- 3) 本材の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- 4) 変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 5) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 6) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・高温、直射日光を避け、常温・常湿で保管すること。

- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

〔当社データによる〕

※(例)  YYYY- MM - DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者 株式会社 松風プロダクツ京都
※住所 〒613-0022
京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1
※電話番号 0774-41-1321

販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112