

歯科材料9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

## セラマスター

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔構造〕

- 1) 作業部：ダイヤモンド粒子を合成ゴムで結合した軸付研磨材。
- 2) 軸部：ステンレス鋼  
軸部形式2：HP用

#### 〔種類〕

2種

| 種類            | 作業部色調 | 用途    |
|---------------|-------|-------|
| セラマスター<br>コース | 青色    | 中仕上げ  |
| セラマスター        | 淡灰色   | 研磨仕上げ |

### 【使用目的又は効果】

陶材、歯冠用硬質レジン、硬質レジン歯、コンポジットレジン、  
メタルの形態修整などの研磨に用いる。

### 【使用方法等】

#### 〔使用方法〕

本材を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部が大きい形状のため、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。

### ※※【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- ※※1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

| 最高許容回転速度                |
|-------------------------|
| 20,000min <sup>-1</sup> |

- 2) 変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### ※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ※製造販売業者 株式会社 松風プロダクツ京都  
※住所 〒613-0022  
京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1  
※電話番号 0774-41-1321

販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112