

歯科材料 2 歯冠材料  
管理医療機器 陶歯 38644000  
**松風バイオエース 2 0 °**

【形状・構造及び原理等】

珐瑯部、象牙部の 2 層構造よりなる人工歯（臼歯）である。

1）成分：

層の名前	成分
珐瑯部	長石、けい石、その他
象牙部	長石、けい石、その他

2）形態及び大きさ：

解剖学的なバイオ形態を基本形とし、咬頭傾斜角 20° の排列しやすい臼歯である。また、本材は、片側 4 歯の全幅径の寸法から、大きさ別に 28、30、32 の 3 種類がある。

形態	大きさ	上下	左右	部位
M	28、30、32	上顎 下顎	左側 右側	第一小白歯 第二小白歯 第一大臼歯 第二大臼歯
1 形態	3 種	2 種	2 種	4 部位

3）色調：3 色（55、56、58）

4）原理：本材を義歯床に排列・結合することで、総義歯、局部義歯の製作に用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

【使用方法等】

[ 本材と併用する材料 ]

義歯床用アクリル系レジン：「松風アーバン」

[ 使用方法 ]

本材を使用して、通法により義歯の製作を行います。

[ 使用方法に関連する使用上の注意 ]

- 1）本材の珐瑯部は、硬度が高いため咬合の削合調整を入念に行うこと。
- 2）本材の珐瑯部及び象牙部は、硬度が高く、耐摩耗性が高いため形態修正などを行ったときは、入念な研磨を行うこと。

【使用上の注意】

[ 重要な基本的注意 ]

本材の研削、研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスク、保護眼鏡などを使用し、作業により発生する粉塵を防御すること。

[ その他の注意 ]

患者が義歯を使用する上での一般的な注意として以下を指導してください。

- ・義歯を清潔に保つこと。食後、軟かい義歯用歯ブラシを使用し、食物残渣などを軽く取り、清掃すること。また、義歯洗浄剤などを併用すればより効果的である。

【保管方法及び有効期間等】

[ 保管方法 ]

- ・本材は、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

モールドチャート等をご参照ください。