

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

## 松風カッティングディスク

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔形状・構造〕

人造研削材（アルミナ）をフェノール樹脂で結合した薄い円盤状砥石である。

#### 〔仕様〕

##### 基準寸法

2507：直径 25（mm）×厚さ 0.7（mm）

3507：直径 35（mm）×厚さ 0.7（mm）

### 【使用目的又は効果】

歯科技工物の研削に用いる。

硬質合金（ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金等）のスプールカットに用いる。

### 【使用方法等】

歯科用マンドレルに取付け、歯科用電気エンジン、高速レーズなどに装着して使用する。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1） 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
- 2） ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 3） 必ず右回転で使用する。
- 4） 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 5） 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。

### 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- 1） 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

| 最高許容回転速度                |
|-------------------------|
| 20,000min <sup>-1</sup> |

- 2） 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 3） 本材を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4） 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983

京都市東山区福稲上高松町 11

電話番号 075-561-1112