

歯科材料7 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用ユーティリティーワックス 70896000  
**カラートーニングワックス**

**【形状・構造及び原理等】**

[種類]

9色: トランスルーセント、エナメル、デンティン、オパーク、  
ホワイト、ブラック、ブルー、レッド、イエロー

[成分]

パラフィンワックス、カルナバロウ、ダンマル、蜜ロウ、その他

[原理]

加熱によって溶融し、冷却によって凝固する。

**【使用目的又は効果】**

追加盛上法によるクラウン、ブリッジのロウ型採得及びクラウン、  
ブリッジの試適等に用いる。

**【使用方法等】**

[使用方法]

1) 歯冠築盛や歯型彫刻

主として追加盛上法を用いて行います。まずエナメル色、  
デンティン色、オパーク色をベースにトランスルーセント、  
ホワイト、ブラック、ブルー、レッド、イエロー色を用いて必  
要な色調を作ります。

調合したデンティン色ワックスで象牙色部を盛上げ、所定の  
形態を作り、その上に調合したエナメル色ワックスを盛上げ、  
歯型を築盛し仕上げます。また必要に応じて特殊色を追加築  
盛します。

ワックスが冷えた後、不要部分をインスツルメントで削り、  
形を整えます。

2) 金属冠への築盛

先にオパーク色ワックスを一層溶かしつけ、金属色の反映を  
遮断した後、上記方法で歯型を築盛します。

ワックスが冷えた後、不要部分をインスツルメントで削り、  
形を整えます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本材のオパーク、ホワイト色は鑄造用ワックスとして使用しない  
こと。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- 1) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意  
すること。
- 2) 過熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・本材は、直射日光を避け、室温(1~30 )にて保管すること。
- ・本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に  
保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理  
すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112