

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

松風カーボランダムホイール

【形状・構造及び原理等】

炭化けい素質人造研削材（研削砥粒）をガラスで結合した、ホイール状砥石。

【使用目的又は効果】

陶歯、陶材、硬質レジン、金合金、パラジウム合金、銀合金の補綴物等の研削に用いる。

【使用方法等】

本材を歯科用マンドレルに取付け、歯科用電気エンジン、マイクロモーター又は高速レーズ等に装着して、通法により使用します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用すること。
- 4) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

形態	最高許容回転速度
4, 5, 7, 8 (作業部径φ20mm未満)	30,000min ⁻¹
10, 11 (作業部径φ20mm以上)	20,000min ⁻¹

- 2) 変形、損傷（表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町11
電話番号 075-561-1112