

歯科材料 3 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000

松風ソフトベースⅡ

【形状・構造及び原理等】

[成分]

エチレン-酢酸ビニル共重合レジン

[種類]

2種（S：薄手、W：厚手）

[原理]

本材は熱可塑性レジンで、加熱することにより軟化し、冷却することにより硬化する。

【使用目的又は効果】

吸引成型器を用いて、個人トレー用スペーサーなどの作製に用いる。

【使用方法等】

[本材と併用する材料]

歯科用硬質石こう：「キャブストーン DF」

[本材に使用する機械及び器具]

歯科技工用成型器（吸引成型器）

[使用方法]

- 1) 本材を模型上に置き、ガスバーナーなどで加熱して軟化させ、吸引成型器を用い圧接したままで、冷却して成型します。
- 2) 石こう模型より外し、辺縁をハサミなどで切除して仕上げます。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材をガスバーナーなどで加熱して軟化させる場合は、加熱しすぎないこと。
- 2) 本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光及び負荷を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112