

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ビューティコート グロスリファイン

【禁忌・禁止】

本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

本材は、ペースト状の研磨材である。

〔成分〕

グリセリン、ダイヤモンド粉、着色材、その他

【使用目的又は効果】

歯面コーティング材専用の研磨ペーストであり、歯面コーティング材の光沢研磨に使用する。

【使用方法等】

〔併用する材料〕

- 1) 歯面コーティング材：「ビューティコート」
- 2) 歯科用研磨器材：「ビューティコート パフディスク」

〔使用方法〕

- 1) ノズルの使用方法
 - ① シリンジに装着しているキャップを反時計回りに回して外します。
 - ② 付属のニードルチップを時計回りに回しながら止まるまでしっかりと装着します。
 - ③ シリンジの押し棒を押してペーストを適量取り出します。
 - ④ 使用したニードルチップを破棄し、シリンジ先端にキャップを装着するか新しいニードルチップを装着してその先端にシールドキャップを装着して保管します。
- 2) 歯面に塗布され硬化したビューティコート表面にシリンジから直接本材を適量塗布します。
- 3) ビューティコート パフディスクを用いてビューティコート表面の研磨を行います。
- 4) 研磨後はうがい等により本材を洗い流します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 口腔内で使用したニードルチップは使い捨てであるため、使用後は破棄すること。
- 2) 高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがあるため、 $5,000\text{min}^{-1}$ 以下で使用する。
- 3) パフ等を高速回転したり強く押し当てると、発熱や変形を生じる恐れがあるため注意すること。
- 4) 本材の液成分が分離する可能性があります。品質に問題ありません。ペーストが硬い場合は水を加えて調整すること。
- 5) 強い力で急に押し出すと、ペーストが飛び出る恐れがあるため、ゆっくりと押し出すこと。
- 6) 使用後は速やかにうがい等で水洗すること。
- 7) 本材を用いた仕上げ研磨において、PMT Cのブラシやカップを使用すると十分な仕上がり状態が得られないため、必ずビューティコート パフディスクを使用すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者には使用しないこと。

- 4) 本材が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 5) 本材を飲み込んだ場合には、水で口を洗浄し、大量の水を飲むこと。もし気分がすぐれない場合は、医師の診察を受けること。
- 6) 口腔軟組織や皮膚に付着した場合は、綿球等で拭いた後、大量の水で洗浄すること。
- 7) 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 本材は、高温、直射日光を避け、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・ 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112