

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
ビューティコート バフディスク

再使用禁止

【禁忌・禁止】

ビューティコート バフディスクは、再使用しないこと。

※【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

- ※ 本材は、ディスク状のバフをコアと接着した研磨器材である。本材には、専用のマンドレルを組み合わせる。

【使用目的又は効果】

本材は、歯面コーティング材専用の研磨用バフディスクであり、歯面コーティング材の研磨に使用する。

※【使用方法等】

〔併用する材料〕

- 1) 歯面コーティング材：「ビューティコート」
- 2) 歯科用研磨器材：「ビューティコート グロスリファイン」

〔使用方法〕

1) 専用マンドレル

- ①専用マンドレルを口腔内で使用する際には滅菌します。
- ②専用マンドレルを歯科用電気式ハンドピース等に装着します。
- ③口腔内で使用後、再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行います。
滅菌方法：オートクレーブ（134℃ 3分、又は121℃ 30分）による滅菌を行います。

2) バフディスク

- ①本材を専用マンドレルに差込んで使用します。
- ②本材は単一患者のみ使用します。

3) 研磨方法

- ①ビューティコートでコーティングした歯面に、ビューティコート グロスリファインをシリンジから直接適量塗布します。

- ※ ②本材を回転させ、ビューティコートに押し付けて研磨を行います。ペーストが飛び散る恐れがあるため、回転速度 $5,000\text{min}^{-1}$ 以下で使用します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本材は、専用マンドレルに確実に装着すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チェックでないことを確認すること。
- 3) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 本材を高速回転したり強く押し当てると、発熱や変形を生じる恐れがあるので注意すること。
- 5) 本材は、単一患者のみ使用すること。

- ※ 6) 専用マンドレルの滅菌については、ケミクレーブ、乾熱又は各種薬液によっても可能であるが、各機械メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従って行うこと。なお、塩素系消毒剤は錆が発生することがあるので、長時間浸さないこと。また、清掃液、消毒剤については、各メーカーの指示に従って使用すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材（専用マンドレルを含む）を用いて研磨する際には、指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
$10,000\text{min}^{-1}$

- 2) 本材を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

- 3) 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡等を使用すること。

- 4) バフディスクと専用マンドレルは変形、損傷（錆、傷、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、直射日光、湿気及び外圧（物理的負荷）を避けて保管すること。
- ・専用マンドレルは、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び感染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112