

機械器具 6 5 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填器 70680000

## ビューティコート BCアプリーケーター

### 【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]



[成分]

材質：ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

歯面コーティング材専用の充填器であり、歯面コーティング材を歯牙に塗布するために用いる。また、硬化した歯面コーティング材を歯牙から除去するためにも用いる。

### 【使用方法等】

[併用する材料]

歯面コーティング材：「ビューティコート」

[使用方法]

#### 1) 滅菌

本器を口腔内で使用する際には滅菌します。

#### 2) ペーストの塗布

ビューティコートのペーストをシリンジから歯面に直接塗布した後、又は一度ペーパーパッド上に採取した後、本器を用いて歯面上で均一、且つ平坦に広げます。

#### 3) 硬化したペーストの除去

硬化したビューティコートのペーストを本器の針状側を用いて辺縁部から除去します。

#### 4) 使用後の処置

本器を口腔内で使用後、再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行います。滅菌はオートクレーブにて134℃ 3分、又は121℃ 30分の条件にて行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本器は感染防止のため、同一患者のみに使用し、再使用する際は洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- 2) 洗浄の際、家庭用洗剤・超酸化水（超酸性水）の使用は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- 3) 洗浄の際、磨き粉・金属ウール・金ブラシ等の使用は腐食や錆の原因となるので使用しないこと。
- 4) 洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄を行う際は過積載したり、他の器具と接触したりしないようにすること。
- 5) 本器の滅菌については、ケミクレーブ、乾熱又は各種薬液によっても可能であるが、各機械メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従って行うこと。なお、塩素系消毒剤は錆が発生することがあるので、長時間浸さないこと。
- 6) 本器を使用する際は変形、損傷（錆、傷、曲がり、汚損）等があるものは使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本器は、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び感染を受けないように保管すること。
- ・洗浄・消毒・滅菌後の本器は水分が付着したまま長期間保管すると錆・シミ等の原因になることから、水分を除去し必ず乾燥させてから保管すること。
- ・本器は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

本器の使用前・使用後に、ハンドル部や作業部に割れ、ヒビ、曲がり、傷、汚れ等がないか、目視にて確認すること。異常が認められた場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112