


機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000
松風カートリッジディスペンサー

【形状・構造及び原理等】

【形状】

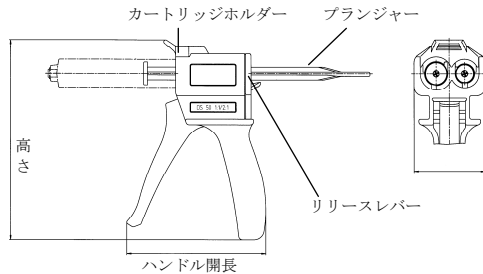

高さ：158 (mm)
ハンドル開長：109 (mm)

【原理】

ハンドルを握るとプランジャーが繰り出され、カートリッジ内のペーストを押し出す。

【使用目的又は効果】

カートリッジに充填された歯科材料（印象材料、セメントなど）の練和物の押し出しに使用する。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) ディスペンサーのリリースレバーを押し上げて、プランジャーを手前一杯まで引きます。
- 2) ディスペンサーのカートリッジホルダーを引き上げて、カートリッジ底部の V 字溝のある側を下にしてディスペンサーに装着し、カートリッジホルダーを押し下げてカートリッジを固定します。
- 3) リリースレバーを押し上げ、プランジャーをカートリッジとかみ合うところまで手で押し込みます。
- 4) カートリッジのキャップを反時計回りに 1/4 回転させてから下方向に折るようにして取り外し、少量ペーストを押し出してカートリッジ先端より 2 種のペーストが均等に出ることを確認します。
- 5) 松風ミキシングチップの V 字突起をカートリッジ先端の V 字溝に合わせて挿入し、奥まで押し込みます。さらに松風ミキシングチップの固定用キャップ部をカートリッジに対して時計回りに 1/4 回転させて確実に装着します。
- 6) ハンドルを数回操作し、ペーストを押し出します。使用後は松風ミキシングチップがそのままキャップの代わりになります。松風ミキシングチップ交換の際はキャップと同様に松風ミキシングチップの固定用キャップ部を反時計回りに 1/4 回転させてカートリッジ先端の V 字溝に合わせて、下方向に折るようにして取り外してください。
- 7) 2 回目以降の使用に当たっては新しい松風ミキシングチップを装着する前に少量ペーストを押し出し、カートリッジ先端より 2 種のペーストが均等に出ることを確認します。もし、ペーストが出ない場合は、カートリッジ先端の硬化物を除去してください。
- 8) カートリッジを交換する際は、リリースレバーを押し上げてプランジャーを手前一杯まで引き、カートリッジホルダーを引き上げてカートリッジを取り替えます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) カートリッジ及び松風ミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから印象採得を行うこと。
- 2) ハンドルに手指を挟まないよう注意すること。
- 3) 練和物を急激に押し出すと、カートリッジが割れる恐れがあるので、静かにハンドルを握って練和物を押し出すこと。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 1) 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
- 2) 本器に損傷、割れ、ひび、曲がり等のあるものは、使用しないこと。
- 3) 必要に応じて滅菌を行う場合、ディスペンサーの樹脂部は 132℃を超えると変形する恐れがあるので、滅菌器の温度を 132℃を超えて上昇させないこと。
- 4) オートクレーブでの滅菌後はディスペンサーが完全に冷えてから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本器は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福福上高松町 11
電話番号	075-561-1112