

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

松風ラボシリコーン

【形状・構造及び原理等】

[成分]

構成名	性状	成分
ベース	白色 パテ状	ジヒドロキシポリジメチルシロキサン、エチルシリケートポリマー、炭酸カルシウム、流動パラフィン、香料、その他
キャタリスト	青色 ペースト状	有機錫化合物、無水ケイ酸、着色材、その他

[原理]

ジヒドロキシポリジメチルシロキサンとエチルシリケートポリマーとの重縮合反応により硬化し、ゴム質弾性体となる。

[性能]

項目	仕様
硬さ（10 分後）	70

JIS - A 型硬度計による測定値

【使用目的又は効果】

技工用のコア用印象材として使用する。

【使用方法等】

- 1) ベースを付属の計量スプーンですり切り一杯取り、手のひら又は紙練板上に軽く押し広げます。（写真 No.1）
- 2) 広げたベースに計量スプーンの柄の部分軽く押し当て、窪みをつけます。（写真 No.2、3）
- 3) キャタリストをチューブの口径と同じ太さでその窪みの長さ分（約 1～1.5cm）だけ押し出します。このとき、チューブの先がベースの先に触れないように注意します。（写真 No.4）
- 4) キャタリストを包み込むようにして、ベースの白色とキャタリストの青色が均一に混ざるように 30～45 秒で練和します。（写真 No.5）
- 5) 練和物を出来るだけ均一な厚みにさせて、模型等の端から気泡の入らないように注意して圧接します。（写真 No.6）

No.1

No.2




No.3

No.4



No.5

No.6

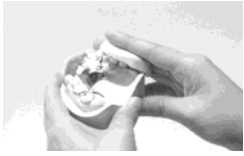

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) キャタリストは、常に一定の太さに出すこと。
- 2) キャタリストは空気に触れるとゲル化しやすいため、採取後はすみやかに密栓すること。
- 3) キャタリストを長期間使用しない場合、ノズル部分で硬くなることがあるので、硬くなった部分を取り除き、清掃してから使用すること。
- 4) 気温が高くなると、操作時間が短くなるので注意すること。
- 5) 気温が低いときは硬化が遅くなるので注意すること。
- 6) 皮膚の弱い方は、練和時にハンドクリームまたはポリ手袋を使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 2) 本材または練和物は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐ大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本材は、直射日光、火気を避け、常温（15～25℃）で保管すること。
- ・ 開封後は、密閉して保管すること。
- ・ 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

（例） YYYY - MM - DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112