


松風サブライト V

※【形状・構造及び原理等】

〔外観〕

1) 本体

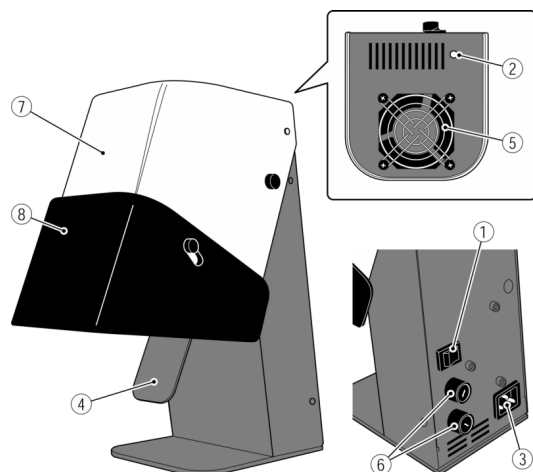

番号	名称
①	電源スイッチ
②	パイロットランプ
③	インレット
④	タッチスイッチ
⑤	冷却ファン
⑥	ヒューズホルダ
⑦	カバー
⑧	ライトガード

2) 付属品



番号	名称
①	ハロゲンランプ
②	電源コード

〔電氣的定格〕

- 1) 定格電源電圧及び周波数 AC100-127/200-240V 50/60Hz
- 2) 電源入力 175/330VA
- 3) 電撃保護の形式の分類 クラス I

〔寸法及び質量〕

- 寸法 幅 112×奥行 210×高さ 252mm
質量 約 2.5kg

〔特性・性能又は機能〕

- 1) 形式 SSBLV-1
- ※ 2) 光源 ハロゲンランプ JCR 110V 150W/S
- 3) 光照射時間 5 秒～20 秒
(タッチスイッチの押し時間による)

〔原理〕

本器は、レジンの光重合に有効な波長を有するハロゲンランプ 1 個を光源とし、技工操作において光重合型レジンをあらかじめ部分的に硬化（固定）させるために用いるスタンド型の重合器である。

【使用目的又は効果】

歯科技工作業における光重合型レジン材料の予備重合に使用する。

※【使用方法等】

詳細な設置方法や使用方法については、取扱説明書等を必ず参照してください。

〔設置・接続方法〕

- 1) 本体を水平で安定した台に設置します。
- 2) カバーを開けてハロゲンランプを取り付けます。
- 3) 電源コードは AC100V 医用コンセントに接続します。

〔使用方法〕

・基本操作

- 1) 電源スイッチを ON にします。
- 2) ランプの下側で重合物を保持し、タッチスイッチを軽くひと押しします。
- 3) ライトガードを通して見て、重合物が照射光の下に収まるように調節します。
- 4) 重合を終了させるときは、重合物を照射光の下からはずします。
- 5) 使用後、約 3 分間無操作の状態待ち、冷却ファンによって機器が十分に冷めたことを確認して、電源スイッチを OFF にします。

・ライトガードの調節

- 1) ライトガードを固定している調節ネジをゆるめます。
- 2) ライトガードの位置を調節します。
- 3) 調節が終わったら調節ネジを締めて固定します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと。
- 2) 水をかけないこと。
- 3) 照射光を直視しないこと。
- 4) ランプ前面のフィルタ及びその周辺に触らないこと。
- 5) 照射光が極端に集中している部分に長時間手を近づけないこと。
- 6) ランプ前面のフィルタを取り外したり、割れた状態で使用しないこと。
- 7) 冷却ファンをふさがないこと。また、冷却ファンに触れたり冷却ファンを停めたりしないこと。

※ 8) ランプから紫外線が放出されるため、目や肌を保護すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 必ず付属の電源コードを用いること。
- 2) 引火性のものや可燃物を近くに置かないこと。
- 3) 水のかかるような場所、湿度の高い場所に置かないこと。
- 4) 定格電源電圧の範囲内で使用すること。
- 5) 電源は、電源入力以上の容量が得られる単相交流電源を使用し、タコ足配線はしないこと。
- 6) 室温 5～40℃の範囲内で結露のない状態で使用すること。
- 7) コンセントは緩んでいたり、ほこりのたまったりしたものを使用しないこと。
- 8) 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないこと。
- 9) 使用後は約 3 分間無操作の状態待ち、冷却ファンによって本器が十分に冷めたことを確認して電源スイッチを切る。また長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 10) 煙が出たり、異臭がする等の異常が発生したときは、使用をやめること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本器は、直射日光の当たらない場所で、温度 0～40℃、湿度 10～85%（結露の無いこと）で保管すること。

- 2) 本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【保守・点検に係る事項】**

詳細については取扱説明書の「安全にお使いいただくために」の項、「保守・点検」の項、及びハロゲンランプ個装箱の警告・注意表示を必ず参照すること。

- 1) 取扱説明書に従い、日常の保守・点検を励行すること。
- 2) 本器使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して、取扱説明書に従い、点検又は修理依頼すること。
- 3) 本器の点検や清掃及びランプ、ヒューズ交換を行うときは電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜くこと。その後、少なくとも 10 分以上放置し、本器が完全に冷めていることを確認してから行うこと。
- 4) ランプ、ヒューズ交換以外の分解、修理や改造は絶対に行わないこと。
- 5) 交換するランプ、ヒューズは、必ず指定のものを使用すること。
- 6) ランプを交換するときは、コードを持たずにソケット部を持って抜き差しすること。
- 7) ランプは、ランプソケットの奥までしっかりと接続・装着すること。
- 8) ハロゲンランプのガラス球（バルブ）部分や反射鏡面に衝撃や振動を与えたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。
- 9) ハロゲンランプのガラス球（バルブ）や反射鏡面には、素手で触らないこと。
- * 10) 本器使用中に異常を感じたり、横転などで外部から大きな力が加わり、外観上、凹みなどの損傷が認められる場合、直ちに使用を中止し、取扱説明書に従って点検又は修理依頼をすること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11

** 電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482