

医療用品4 整形用品  
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 70914000

## キャプチャーシート ハード

### 【禁忌・禁止】

本材又は本材に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112

### \* 【形状・構造及び原理等】

[成分]

ポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂

\* [形状]

ポリエチレン製保護フィルム付きシート（クリア）

| 厚さ  | 形状    |         |         |
|-----|-------|---------|---------|
|     | 正方形   | 円型      |         |
| 0.5 | 127mm | φ 120mm | φ 125mm |
| 0.8 |       |         |         |
| 1.0 |       |         |         |
| 1.5 |       |         |         |
| 2.0 |       |         |         |

### 【使用目的又は効果】

本材は、歯科用咬合スプリントを作製するために用いる。  
ただし、使用期間が30日を超えないものに限る。

### 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 歯科技工用成型器に本材をセットして、加熱します。
- 2) 本材が軟化して昇降テーブル面から垂れ下がり始めた状態（約5mm程度）で成型を行います。
- 3) シートが完全に冷えた後、ハサミやカーバイドバー等で切り出してから石こう模型を外し、辺縁を研磨します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本材は、作製中に高温になるので火傷等に注意すること。
- 2) 本材をハサミやカーバイドバー等で切り出すときや研磨の際には、目の損傷を防ぐため保護眼鏡等を使用すること。
- 3) シートの角等で指を切るおそれがあるので、取り扱いには注意すること。
- 4) 本材には、キズや汚れを防止するために両面に保護シートが貼ってあるため使用する前に必ず剥がして使用すること。
- 5) 本材は吸湿しやすいため、開封後、未使用材は乾燥剤の入ったアルミ袋のチャックを必ず閉めて保管すること。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】


[保管方法]

- ・本材は、湿気の少ない場所、又、密閉した状態で保管すること。
- ・本材は、直射日光の当たる場所での保管はしないこと。
- ・本材を高温となる場所に置かないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は、包装、容器に記載の使用期限※までに使用すること。

[記載の使用期限は、当社データによる]

※(例  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY年 MM月 DD日を示す)