

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

松風ディスク WAX

【形状・構造及び原理等】

〔種類〕

φ98×14mm、φ98×20mm

〔成分〕

パラフィンワックス、青色染料

〔原理〕

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、歯科鑄造物のロウ型に用いる。

〔仕様〕

項目	自社標準値
焼却残さ※1	0.1%以下

※1：試験方法は JIS T 6503:2013 による。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン、ブリッジの間接法によるロウ型採得に用いる。

【使用方法等】

〔本材に使用する機械〕

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

〔使用方法〕

CAD/CAM 加工機などを用いて加工を行い、必要に応じて、マージンの調整を行い、通法に従い、スプルーを植立し、鑄造を行います。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 再溶解して使用しないこと。
- 2) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 3) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。
- 4) 石こう系埋没材を使用する場合、マージンにバリがでることがある。その場合、急速加熱を避けるか、マージンをワックスで調整すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112