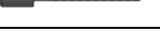
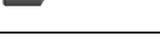
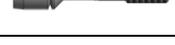
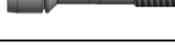


機械器具 58 整形用機械器具
 一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
松風S-WAVE 技工用スクリュ


【禁忌・禁止】
 再使用禁止
 口腔内使用禁止

**
 ****【形状・構造及び原理等】**
 ** [構成部品]
 **

構成部品名	外観
LBS-BMK-ACT-NP	
LBS-BMK-RP	
LBS-BMK-WP	
LBS-RPL-NP	
LBS-RPL-RP-60	
LBS-ACT-30	
LBS-ACT-RP	
LBS-BL-NC	
LBS-BL-RC	
LBS-CER	
LBS-EX	
LBS-OSTX-Y	
LBS-OSTX-A	
LBS-OSTX-L	
LBS-XIV-30	
LBS-XIV-34-55	

構成部品名	外観
LBS-SCV	
LBS-CAMK-33-43	
LBS-CAMK-50-60	
LBS-BHZIN	
LBS-BHZEX-35	
LBS-BHZEX-40-60	
LBS-EL-NP	
LBS-EL-RP	
LBS-T4	
LBS-MYT	
LBS-SB1-SB2	
LBS-SB3	
LBS-BF30	
LBS-BF35	
LBS-BF4X	
LBS-TL-RN-WN	
LBS-POIEX34	
LBS-POIEX37	

構成品名	外観
LBS-POIEX42	
LBS-POIEX47-52	
LBS-MUA48	
LBS-SRA3546	
LBS-OSEV-30	
LBS-OSEV-36	
LBS-OSEV-42	
LBS-OSEV-48	
LBS-SPL-375	
LBS-CNG-3343	
LBS-ADV-NRW	
LBS-TS3-M	
LBS-TS3-R	
LBS-UF2R	
LBS-ARG	
LBS-GM	
LBS-BLX	
LBS-BL-SC	
LBS-EVUNI	
LBS-MUA60	
LBS-SYNO	

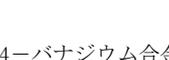構成品名	外観
LBS-OSEV-54	
LBS-EVMB	
LBS-OTMMU	
LBS-UF2N	
LBS-AON	
LBS-SL	
LBS-DNTSA	
LBS-BBCMU	
LBS-LGY-30	
LBS-LGY-35-57	
LBS-IMPDU	
LBS-CAMBA-43	
LBS-CAMBA-60	
LBS-CNG-50	
LBS-STO-30	
LBS-STO-50	
LBS-GCCO	
LBS-SPI-35	
LBS-SPI-40-45	

[成分]

チタン 6-アルミニウム 4-バナジウム合金 [ASTM F136]

【使用目的又は効果】

レプリカなどの歯科インプラント製品に、スクリュー固定式の補綴装置を固定する。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) レプリカなどの歯科インプラント製品の種類に対応して作製されたスクリュ固定式の補綴装置を、歯科インプラント製品に装着します。
- 2) 補綴装置が装着された歯科インプラント製品の種類に対応する本品を選択し、補綴装置のアクセスホールに本品を挿入します。
- 3) 本品に対応するドライバーを本品の駆動部に挿入し、ドライバーを回転させて締結し、歯科インプラント製品と補綴装置を固定します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) レプリカやドライバーは、本品の種類に対応した各種歯科インプラント製品の純正品を用いること。
- 2) レプリカやドライバーの使用方法は、各種純正品の使用方法に準ずること。
- 3) 本品に、過度の力、衝撃をかけないこと。
- 4) 本品は、15N・cm以下のトルクで使用する。
- 5) 本品が添付されたスクリュ固定式の補綴装置の固定にのみ使用し、他の補綴装置等には使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 使用前に変形、破損等の有無を確認し、異常が認められる場合は、使用を中止すること。
- 2) 使用前に汚れや異物付着がある場合は、きれいな不織布等で拭きとってから使用すること。
- 3) 本品の加工、改造は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温、多湿、直射日光、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
*電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482