

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
(歯科用マンドレル 35170000)

PRGコンポグロス キット

再使用禁止(松風スーパースナップ バフディスク)

【禁忌・禁止】

- 1) ペースト成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 松風スーパースナップ バフディスクは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

構成品	形状	成分
PRGコンポグロス	ペースト状	精製水、グリセリン、酸化アルミニウム、ダイヤモンド、その他
松風スーパースナップ (バフディスク No. 8)	ディスク	塩化ビニル ポリエステル
松風マンドレル (ワングロス用CA)	軸部形式 1 (CA 用)	ステンレス鋼


【使用目的又は効果】

歯科用研磨器材の「PRGコンポグロス」と「松風スーパースナップ」及び歯科用マンドレルの「松風マンドレル」を組み合わせた歯科用研磨器材であり、口腔内の歯科充填物、歯冠補綴装置及び天然歯の最終仕上げ用の研磨キットとして同一包装することで、臨床上の利便性に供することを目的としている。

【使用方法等】

[使用方法]

1) ニードルチップの装着

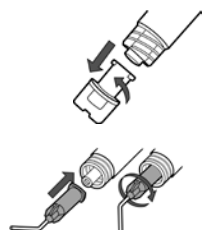

①保管栓を回しながら引き抜きます。

②ニードルチップをシリンジ先端部に挿入後、時計回りに回してしっかりと固定します。

2) 松風マンドレル

- ①本材を口腔内で使用する際は滅菌します。
- ②本材を歯科用電気式ハンドピース等に装着します。
- ③口腔内で使用後、再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行います。
滅菌方法：オートクレーブ（134℃ 3分、又は121℃ 30分）による滅菌を行います。

3) 松風スーパースナップ バフディスク

本材を松風マンドレルに差込んで使用します。


4) 研磨方法

- ①歯科充填物及び歯冠補綴装置の形態修整及び咬合調整後の光沢研磨
 - ・松風シリコンポイント等で仕上げ研磨した後に使用します。
 - ・松風スーパースナップ バフディスクにペーストを適量塗布し、研磨を行います。
 - ・研磨後は、うがい等によりペーストを水洗します。
- ②歯科充填物、歯冠補綴装置及び天然歯のステイン除去
 - ・松風スーパースナップ バフディスクにペーストを適量塗布し、研磨を行います。
 - ・研磨後は、うがい等によりペーストを水洗します。

5) 使用後の保管



①保管時は、シリンジからニードルチップを取り外し、保管栓を装着して下さい。

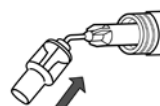

②使用後は新しいニードルチップを装着し、黒シールドキャップでニードルチップ先端部を保護することができます。（ただし、長時間の保管には保管栓を使用して下さい。）

[使用方法に関連する使用上の注意]

1) PRGコンポグロス

- ①本材を直接歯面に塗布しないこと。
- ②高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがあるため、5,000min⁻¹以下で使用する。
- ③ペーストが硬い場合は、水を加えて調整すること。
- ④強い力で急に押し出すとペーストが飛び出る恐れがあるため、ゆっくり押し出すこと。
- ⑤使用後は、速やかにうがい等で水洗すること。
- ⑥PMTCのブラシやカップを使用すると光沢が出ない場合があるため、注意すること。
- ⑦金属を研磨するとペーストが黒くなる場合があるので、その際は別の歯科充填物及び歯冠補綴装置には使用しないこと。
- ⑧ニードルチップを交換する際は、清潔な医療用（歯科用）手袋を着用すること。

2) 松風スーパースナップ バフディスク/松風マンドレル

- ①バフディスクは、松風マンドレルに確実に装着すること。
- ②ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- ③使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ④バフディスクを高速回転したり強く押し当てると、発熱や変形等を生じる恐れがあるため、注意すること。
- ⑤松風マンドレルの滅菌については、ケミクレーブ、乾熱又は各種薬液によっても可能であるが、各機械メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従って行うこと。なお、塩素系消毒剤は錆が発生することがあるので、長時間浸さないこと。また、清掃液、消毒剤については、各メーカーの指示に従って使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により、発疹、湿疹、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により、発疹、湿疹、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
- 4) 本材が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 5) 本材を飲み込んだ場合には、水で口を洗浄し、大量の水を飲むこと。もし気分がすぐれない場合は、医師の診察を受けること。
- 6) 口腔軟組織や皮膚に付着した場合は、綿球等で拭いた後、大量の水で洗浄すること。

- 7) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
5,000min ⁻¹

- 8) 本材を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
- 9) 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために患者及び術者は保護眼鏡を使用すること。
- 10) 松風スーパースナップ バフディスクと松風マンドレルは変形、損傷(錆、傷、曲がり、汚損)等があるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・PRGコンボグロス は直射日光を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・松風スーパースナップ バフディスクは、直射日光、湿気及び外圧(物理的負荷)を避けて保管すること。
- ・松風マンドレルは、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び感染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

※(例)  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112