


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用成型器 70750010

S-WAVE バキュームシーラー

【形状・構造及び原理等】

〔外観〕

1) 本体

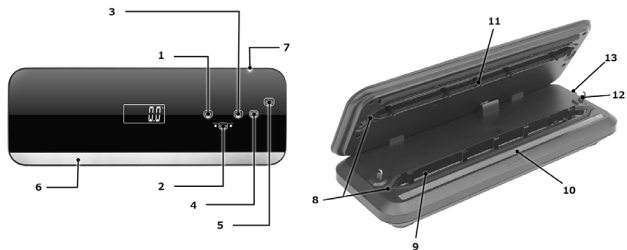

番号	名称	番号	名称
1	[SEAL] ボタン	8	シーリングストリップ
2	[PRESSURE] ボタン	9	ドリップトレイ
3	[VACUUM SEAL] ボタン	10	シーリングヒーター
4	[STOP] ボタン	11	ストッパー
5	[SERVICE] ボタン	12	オートロックラッチ
6	開閉スイッチ	13	カッター
7	AC インレット		

2) 付属品

名称
電源コード
バキュームシーラー用袋 (20×30cm)

〔電氣的定格〕

- 電源電圧及び周波数 AC100V 50/60Hz
- 電源入力 120VA
- 電撃保護の形式の分類 クラス II

〔特性・性能又は機能〕

1) 使用環境条件

屋内使用

温度：5～40℃

湿度：5～31℃では最大相対湿度 80%、及び 31℃を超えると
きは 40℃において相対湿度 50%まで直線的に減少する
湿度（結露がないこと）

高度：2,000m 以下

〔寸法及び質量〕

- 寸法 幅 380×奥行 140×高さ 68 (mm)
- 質量 約 1.6kg

〔動作原理〕

本器は、真空ポンプを用いてオートロックラッチを動作させて蓋の開閉を行うとともに、バキュームシーラー用袋内を真空ポンプにて脱気した後、シーリングヒーターにてバキュームシーラー用袋の開口端を封止し、真空密封を行う。

【使用目的又は効果】

歯科用 3D プリンタを用いた補綴装置や義歯床の製作において、バキュームを実施する際に使用し、造形物の変形を抑制する。

【使用方法等】

詳細な設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必ず参照してください。

〔設置・接続方法〕

- 本器を安定した台に設置します。
- 電源コードを本体背面下部の AC インレットに差し込みます。
- 電源コードをコンセントに差し込みます。

〔使用方法〕

- 本体の蓋が閉じている場合は、開閉スイッチに触れ、本体の蓋が開いた状態にします。
- 石膏模型等に 3D プリンタ造形物を装着し、専用の袋に入れます。
- ストッパーにあたるまで専用の袋の開口端を入れます。
- [VACUUM SEAL] ボタンを押し、脱気及び封止を開始します。
- 動作が終了し、本体の蓋が開いたら専用の袋を取り出します。
- 電源コードをコンセントから抜きます。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 使用中又は使用後直ぐのヒーター部は、高温になるため、絶対に触らないこと。
- 開閉スイッチを操作するときは、手指等が蓋の下にないことを確認すること。
- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。
- バキュームシーラー用袋は、繰り返し使用しないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 電源は、電源入力以上の容量が得られる電源を使用し、たこ足配線はしないこと。
- 損傷した電源コードもしくは電源プラグを使用しないこと。
- 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
- 水のかかるような場所に置かないこと。
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと。
- 水やその他の液体をかけないこと。
- コンセントは、緩んでいたり、ほこりのたまったりしたものを使用しないこと。また、風通しの良い場所で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 温度-20～65℃、湿度最大 90%（結露がないこと）で保管すること。
- 本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔耐用期間〕

納入後、正規の保守点検を行った場合に限り、2 年間とする。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の保守・点検の項を必ずお読みください。

- 機器の点検や清掃を行う前に、電源プラグをコンセントから抜くこと。また、ヒートシール部は、充分に冷ますこと。
- 本器に異常や誤動作が見受けられる場合、直ぐに使用を中止し、点検・修理の依頼を販売店まで連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482

取扱説明書等を必ずご参照ください。