


機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成へら (JMDN コード 38530000)

## ミキサースパチュラ

### 【形状・構造及び原理等】\*

#### 1) 外観図

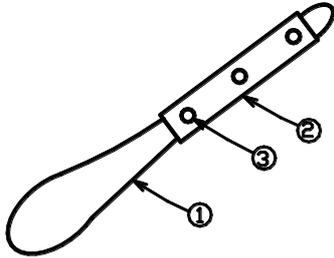

① 本体部 ② 柄 ③ 鋏

#### 2) 本体寸法及び重量

- ①寸法 W 233 × H18.5 × D13 (m/m)  
②重量 約 65 g

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売元

城田電気炉材株式会社

TEL 03-3330-6370 FAX 03-3330-6332

発売元

株式会社デントロニクス

TEL 03-3209-7121 FAX 03-3232-6764

### 【使用目的は効果】

歯科印象材料を練和又は混合するのに用いる。

### 【使用方法等】

使用方法

ラバーボウルに粉末と水を入れ本器具にて練和又は混合する。

### 【使用上の注意】

- 1) 本器具の落下、取扱いの不注意は破損の原因になりますので注意すること。
- 2) 金属部分の形状は刃物状のため取扱いには特に注意すること。
- 3) 本器具は歯科印象材の練和又は混和以外には使用しないと。

### 【保守・点検に係わる事項】

歯科印象材料の付着したままの状態にしないこと。  
常に水などで洗浄をしてください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。