

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（JMDN コード 70682000）

デンタルミキサーⅡ

【形状・構造及び原理等】 ＊ ＊

1）外観図



- | | | |
|-----------|--------------|------------|
| ① 本体カバー | ⑥ ゴム足 | ⑪ コネクターカバー |
| ② ベース | ⑦ 受け台 | |
| ③ メインランプ | ⑧ ラバーボウル | |
| ④ メインスイッチ | ⑨ フットコントローラー | |
| ⑤ コネクター | ⑩ スパチュラ | |

2）本体寸法及び重量

- ①寸法 W138×H200×D225 mm
(Hはラバーボウル装着時)
②重量 約 2 Kg (本体のみ)

3）作動・動作原理

着脱可能なラバーボウルをモーターによって回転させ、ラバーボウルの中に入れた歯科材料を付属のスパチュラを当てながら混ぜるものである。

4）電気定格

- ①電源電圧 AC100V 50/60Hz
②消費電力 90W

5）性能

- 回転数 0～850±50min⁻¹

【使用目的又は効果】

本器は歯科材料を練和するのに用いる。

【使用方法等】

- 1）使用方法
機器の詳細な操作方法是、付属の取扱説明書〔4〕操作の項をご使用前に必ずお読み下さい。
- 2）使用方法等に関連する使用上の注意
機器の詳細な使用方法是、付属の取扱説明書〔1〕ご使用の前にの項をご使用前に必ずお読み下さい。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

取付・設置（組立て・据え付け）

機器の詳細な設置方法は、付属の取扱説明書〔3〕設置の項をご使用前に必ずお読み下さい。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り6年間とする。（自己認証）

【保守・点検に係わる事項】

詳細については、取扱説明書〔6〕保守点検の項をご使用前に必ずお読み下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

城田電気炉材株式会社
TEL 03-3330-6370

総代理店
株式会社モリタ東京製作所
TEL 048-723-2621